

seit
1988

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Stegemannstraße 5 – 7
56068 Koblenz

Telefon: 0261 13388-0
Telefax: 0261 13388-22

 www.burbach-goetz.de

 info@burbachgoetz.de

E-MOTION®
duo drive

KRAFTVERSTÄRKENDER ZUSATZANTRIEB
MIT PERMANENTER FAHRFUNKTION

 **alber**

**KRAFT,
DIE AUS
DEN
RÄDERN
KOMMT.**



NEU

E-MOTION DUODRIVE – ENTSPANNT DURCH DEN TAG

LEICHTER ANSCHIEBEN



Das Konzept des e-motion DuoDrive ist genial einfach: Du kannst die e-motion **Antriebsräder** über zwei Adapter mit beinahe jedem handelsüblichen Rollstuhl kombinieren. Während der Fahrt messen eingebaute Sensoren in den Greifreifen deine Anschubbewegung und stellen dir die gewünschte Motorkraft zur Verfügung. So kannst du deinen Rollstuhl schon mit sehr wenig Kraft fahren, lenken und bremsen.

Dabei schonst du deine Muskeln und Gelenke und kommst immer sicher und entspannt an dein Ziel. Der e-motion DuoDrive verfügt über **zwei Unterstützungsstufen** für den Innen- und Außenbereich und das Fahrverhalten ist individuell einstellbar.

Mit einem Gewicht von **nur 7,8 kg** pro Antriebsrad gehört der e-motion DuoDrive zu den leichtesten aktiven Zusatzantrieben, die es gibt.

Der e-motion DuoDrive passt an jeden handelsüblichen Rollstuhl: einfach die Räder austauschen. Die manuellen Rollstuhlräder können bei Bedarf weiterverwendet werden.

Hocheffiziente Elektromotoren und in den Radnaben integrierte Lithium-Ionen-Akkus sorgen für ausreichend Power und Reichweite



ZWEI ANTRIEBSARTEN – DU HAST DIE WAHL

ALLES IM GRIFF

Mit dem e-motion DuoDrive hast du die Möglichkeit, längere Strecken ohne Anschubbewegung am Greifreifen im **Cruise-Mode** (Dauerfahrfunktion) zurückzulegen. Du musst nur über die Greifreifen lenken, den Rest erledigt der Antrieb. Somit hast du zwei Antriebsarten, zwischen denen du jederzeit je nach Bedarf wechseln kannst. Und das geht ganz einfach mit dem kabellosen DuoDrive-Bediengerät.

Besonders vorteilhaft ist der Cruise-Mode, wenn...

... dir unterwegs die Kraft ausgeht und du **müde** wirst.

Der e-motion DuoDrive bringt dich immer sicher nach Hause.

... du **Steigungen** bewältigen musst. Der e-motion DuoDrive schafft fast jede Steigung und du kommst im Cruise-Mode entspannt an dein Ziel.

... du an **Gefällen** unsicher bist und gerne einen Bremsassistenten hättest, der eine vorgegebene Geschwindigkeit hält.

MIT DRÜCKEN UND DREHEN – KINDERLEICHT CRUISEN

Drehen: Cruise-Geschwindigkeit erhöhen oder verringern

Übersichtliche Akku-anzeige der Antriebsräder

1 x Drücken: Cruise-Mode wird gestartet oder gestoppt

2x Drücken im Stillstand: Wechsel der Unterstützungsstufe für den Handbetrieb mit Restkraftunterstützung

Bluetooth™

Eingebauter Lithium-Akku: hält bis zu 12 Stunden



Eine Drehung am Bediengerät reicht aus und du wechselst während der Fahrt in den Cruise-Mode (Dauerfahrfunktion).



Mit dem Cruise-Mode hast du auch mal eine Hand frei. Ideal beim Einkaufen oder auf Reisen.

TECHNISCHE DATEN E-MOTION DUODRIVE

HILFSMITTELNUMMER: 18.99.05.2002

Gewicht pro Rad	7,8 kg 0,25 kg Max. 6 km/h Bis zu 25 km, im Cruise-Mode bis zu 15 km 80
Gewicht Bediengerät DuoDrive	Watt / 40 Nm pro Rad 150 kg 190 kg Abhängig vom verwendeten Rollstuhl, Im
Unterstützungsgeschwindigkeit	Cruise-Mode bis zu 5,7 ° (10%)
Reichweite	22", 24", 25"
Leistung/Drehmoment	Mobility Plus Package, ECS-Fernbedienung, Schwalbe Marathon Plus Bereifung, pannensichere Bereifung 1" PU massiv oder 1 3/8" mit Reifendecke und PU-Einlage, Greifreifen mit Beschichtung, ergonomische Greifreifen Curve L und Quadro, Speichenschutz mit und ohne Dekor
Maximales Nutzergewicht	
Maximales Gesamtgewicht	
Maximale Steigfähigkeit	
Verfügbare Radgrößen	
Erhältliches Zubehör*	

*Weiteres Zubehör unter www.alber.de

PRODUKTVORFÜHRUNG

Kostenlos! Terminvereinbarung unter:



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/emotion-testen



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Phone +49 07432 2006-0
info@alber.de

www.alber.de





Einfach mobil.

e-fix®

Elektrischer Zusatzantrieb



VON KRANKENKASSEN
ZUGELASSEN

Klein. Leicht. Wendig.

www.alber.de



„Wie schön, wieder
gemeinsam unterwegs
zu sein.“

Mobilität einfach erfahren

Neue Unabhängigkeit genießen

Mit dem e-fix, dem elektrischen Zusatzantrieb für Ihren Rollstuhl, erweitern Sie einfach Ihren Bewegungsfreiraum. Ganz ohne Anstrengung bewältigen Sie so auch längere Strecken oder Steigungen.


Die Umrüstung ist völlig unkompliziert: Durch Ihren Fachhändler werden lediglich die Antriebsräder ausgetauscht sowie Akku-Pack und Bediengerät montiert – fertig. Die Motoren sind dezent in den Radnaben versteckt. Alle gängigen Rollstuhlmodelle lassen sich auf diese Weise mit dem e-fix ausrüsten. Das heißt: Sie können weiterhin Ihren optimal angepassten und gewohnten Rollstuhl verwenden.

Der e-fix bringt Sie mühelos an Ihr Ziel: Egal ob im Haus, beim Einkaufen oder auf Tour mit dem Pkw.

Flexibel bleiben – zwei Rollstühle in einem!

Wenn es die Situation erfordert, lässt sich der e-fix auch spielend leicht manuell bewegen: Sie kuppeln die Antriebsräder mit einem Handgriff aus und Ihr Rollstuhl lässt sich wie gewohnt von Hand anschieben – entweder über die Greifreifen oder durch eine Begleitperson.

Die e-fix Komponenten:

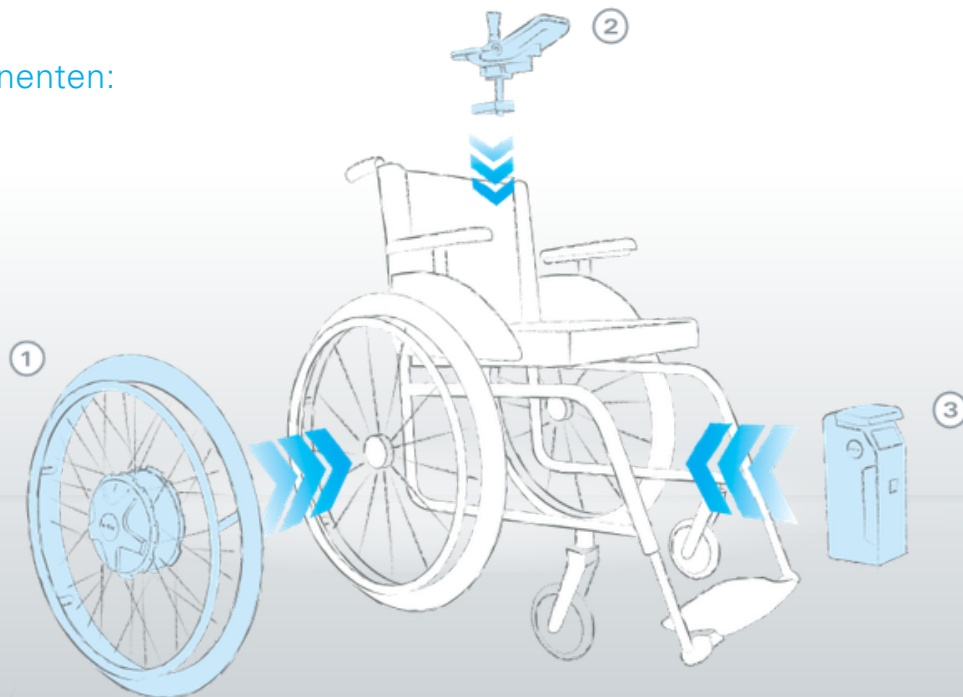

1

KRAFTVOLL – die Antriebsräder

Per Schnellverschluss bequem am Rollstuhl anzubringen und abzunehmen, platzsparend für den Transport.

2

ERGONOMISCH – das Bediengerät

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente, große und informative Displayanzeige, individuell einstellbare Fahreigenschaften.

3

KLEIN UND LEICHT – der Akku-Pack

Platzsparend unter dem Sitz eingehängt, reicht für eine Fahrstrecke bis zu 16 km*.

* abhängig von Personengewicht, Rollstuhleinstellungen und Untergrund. Mit optionalem, kapazitätserweitertem Akku-Pack Reichweite bis 20 km.

„Mit dem e-fix ist mein
Alltag viel leichter.“



Mehr Mobilität. Aber wie?

Einfach bedienfreundlich

Ihr Rollstuhl lässt sich mit dem e-fix kinderleicht steuern – Sie werden auf Anhieb zurechtkommen! Die Geschwindigkeit stellen Sie am griffgünstigen Regler stufenlos von 0,5 bis 6 km/h ein. Dabei gilt: Je langsamer Sie fahren, desto weniger verhält sich Ihr Rollstuhl. Sie lenken, der e-fix denkt!

Auch sonst bietet Ihnen das kleine Bediengerät großen Fahrkomfort. Sein klares, beleuchtetes Farbdisplay liefert alle wichtigen Informationen, wie Akku-Ladung und Geschwindigkeit, auf einen Blick. Und wenn Sie möchten, passen Sie Ihren e-fix mit der intuitiven Menüführung mühelos Ihren persönlichen Wünschen an. Zudem sind intelligente Zusatzfunktionen enthalten, wie die integrierte Umfeldbeleuchtung*, die bei Dunkelheit den Fahrweg ausleuchtet.

Mehr Freiheit im Alltag

Die zwei leisen, aber leistungsstarken Antriebe machen den e-fix sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum idealen Begleiter. Einerseits auf der Stelle drehen und auf engstem Raum rangieren, andererseits aber kraftvoll und sicher Steigungen** bewältigen – kein Problem für den e-fix.

* nicht gemäß StVZO

** bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

Leicht und handlich

Der Akku-Pack Ihres e-fix ist mit nur 2,1 kg Gewicht extrem leicht und mit nur 8 cm Breite sehr schmal. Dank der intelligenten Akku-Aufnahme genügt eine Hand zum Entnehmen bzw. Einsetzen. Die meisten Faltrollstühle lassen sich sogar mit eingebautem Akku zusammenfalten.



Aussagekräftiges Farbdisplay und benutzerfreundliche Bedienelemente



Kompakt, leise, kraftvoll: der e-fix Antrieb

Maßarbeit wie Ihr Rollstuhl

Konfigurieren Sie Ihren e-fix individuell.

Der e-fix passt sich Ihren Bedürfnissen an – ob sanft oder sportlich: Der Antrieb lässt sich individuell programmieren. Somit werden die Fahreigenschaften maßgeschneidert auf Sie angepasst. Das Bediengerät kann für Links- oder Rechtshänder passend montiert werden.

Mit den optional erhältlichen Antriebsrädern mit höherer Leistung kann der e-fix bis zu einem Personengewicht von 160 kg genutzt werden. Und wenn Sie mal nicht selbst fahren möchten, dann einfach die intuitive Begleitsteuerung einstecken und der e-fix wird zur Schiebe- und Bremshilfe für Ihre Begleitperson. Ein umfangreiches Zubehörprogramm bringt zusätzlich Erleichterung und Komfort ins Leben.



e-fix E36: kraftvolle Antriebsräder mit mehr Leistung (optional)



Ausgezeichnete Produkte erkennt man an ihren cleveren Details.

Der kleine Lithium-Ionen Akku-Pack ist mit nur 2,1 kg besonders leicht und somit sehr praktisch in der Handhabung. Die lange Lebensdauer und die 24-monatige Herstellergarantie sorgen rundum sicher für mobile Energie.

Durch das Magnet-Stecker-System EasyConnex findet der Stecker des Bediengeräts und des Ladegeräts sicher in seine Position. Auch die Auto-Kontaktierung des Akkus in der innovativen Akku-Aufnahme ist äußerst hilfreich im Alltag.

Vielfältiges Zubehör



Intuitive Begleitsteuerung: Auf Knopfdruck wird aus dem e-fix eine Schiebe- und Bremshilfe für die Begleitperson.



Schwenkarm: Erleichtert das direkte Heranfahren an Tische.



Aufbock-Kippstützen: Kippschutz, der auch das Abnehmen der e-fix Räder erleichtert.

und vieles mehr... Alber oder Ihr örtlicher Sanitätsfachhändler beraten Sie gerne ausführlich zum umfangreichen Zubehörprogramm.



Handliche Technik für unterwegs

So klein. So gut.



Geringes Gewicht, kein Werkzeug nötig. Zum Verladen nur die Schnellverschlüsse lösen und die e-fix Komponenten vom Rollstuhl abnehmen. Kein Teil wiegt mehr als 7,9 kg, alles findet in jedem Kofferraum bequem Platz. Am Ziel ist der e-fix Rollstuhl dann ebenso schnell wieder fahrbereit.

Service



Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

MADE IN GERMANY

Made in Germany vom Marktführer für Zusatzantriebe.

Auf den e-fix ist Verlass

Der e-fix ist ein Produkt von Alber, dem Spezialisten für besonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen. Unabhängige Institutionen haben den e-fix auf Langlebigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit getestet und positiv bewertet.

An erster Stelle stehen für uns Sicherheitsprüfungen – zum Beispiel durch den TÜV: Sie erhalten bei Alber stets geprüfte Produktsicherheit nach den aktuellsten Richtlinien für Medizinprodukte.



e-fix auf einen Blick. Die häufigsten Fragen und Antworten.

„Passt der e-fix an meinen Rollstuhl?“

Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Es werden am Rollstuhlrahmen Halterungen zur Aufnahme der Antriebsräder montiert. Ihre manuellen Rollstuhlräder können Sie in der Regel weiterverwenden.

„Wie schnell fährt der e-fix?“

Die maximale Geschwindigkeit des e-fix können Sie stufenlos zwischen 0,5 und 6 km/h wählen. So finden Sie mit Sicherheit Ihr optimales Fahrtempo. Das Fahrverhalten kann von Ihrem Fachhändler im Detail an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

„Welche e-fix Varianten gibt es?“

Der e-fix ist für ein max. Personengewicht von 120 kg ausgelegt. Die verstärkten und leistungsstärkeren Antriebsräder (optional erhältlich) erlauben sogar ein Personengewicht von bis zu 160 kg. Den e-fix gibt es in den Radgrößen 22" oder 24".

„Hilft der e-fix auch meiner Begleitperson?“

Ja! Mit der als Zubehör erhältlichen Halterung lässt sich das Bediengerät an den Schiebegriffen des Rollstuhls montieren. Die optionale intuitive Begleitsteuerung erleichtert der Begleitpersonen das Schieben.

„Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?“

Abhängig von Personengewicht, Geländeform, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Untergrund reicht eine Akkuladung für bis zu 16 km. Mit dem optional erhältlichen großen Akku-Pack erhöhen Sie die Reichweite auf bis zu 20 km. Alternativ ist auch ein zusätzlicher Wechselakku eine optimale Lösung, um die Reichweite zu erweitern.

„Wie steil darf eine Rampe oder Steigung sein?“

Der e-fix schafft – abhängig von Rollstuhleinstellungen, Personengewicht und Untergrund – Steigungen bzw. Gefälle bis zu 20 %. **

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

** bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

„Kann der e-fix auch im Auto mitgenommen werden?“

Ja! Der modulare Aufbau macht's möglich. Alle e-fix Komponenten können einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen und platzsparend in jeden Pkw-Kofferraum verladen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

„Wieviel wiegt der e-fix?“

Antriebsräder (E35)	je 7,9 kg	Bediengerät	0,6 kg
Akku-Pack	2,1 kg	Schnittstelle	0,8 kg
Gesamtgewicht (E35) 19,3 kg			

Der e-fix ist ein von den Kostenträgern anerkanntes **Hilfsmittel** und unter der Positionsnummer **18.99.05.1018** im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet (bzw. **18.99.05.1019** für die stärkere Version).

Der e-fix ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und ist auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach der aktuell gültigen Ausgabe der Produktnorm EN 12184.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.

Gewichtsangaben	e-fix E35	e-fix E36
Max. Personengewicht:	120 kg* 170 kg*	160 kg*
Max. Gesamtgewicht:	(e-fix, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)	210 kg*

„Ich habe den e-fix getestet und war sofort überzeugt.
Vereinbaren auch Sie noch heute einen Termin für
eine kostenlose Produktvorführung.“



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/e-fix-testen



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
Telefax 07432 2006-299
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de



Einfach mobil.

scalamobil® scalacombi®

Mobile Treppensteighilfen



Einfach sicher Treppensteigen.

www.alber.de



TÜV-geprüft
Ihre Sicherheit

„Endlich kommen wir mit dem Rollstuhl überall hin!“



Wieder barrierefrei – dank scalamobil und scalacombi

Einfach und sicher Treppen steigen – tausendfach bewährt

Jede einzelne Stufe wird zum Hindernis, wenn man aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr selbstständig Treppen steigen kann: zu Hause, beim Arzt, in öffentlichen Gebäuden oder zu Besuch bei Freunden und Verwandten. Mit den mobilen Treppensteigern von Alber – scalamobil und scalacombi – werden verbaute Wege barrierefrei.

Und so funktioniert's

Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich eine Treppenstufe nach der anderen – aufwärts oder abwärts. Dafür sorgt ein sanfter und zuverlässiger Steigmechanismus – von Alber patentiert. Treppab stoppen vier Sicherheitsbremsen scalamobil und scalacombi automatisch vor jeder Stufenkante. Die Begleitperson wählt die Steigrichtung und Geschwindigkeit aus. Während des Steigvorgangs muss sie den Treppensteiger nur in Balance halten. Der Elektromotor erledigt auf Knopfdruck die Steigarbeit.

Die Produktvorteile auf einen Blick

- Schafft auch enge und gewendelte Treppen – daheim und unterwegs
- Funktioniert auf jedem Treppenbelag: Holz, Stein, Metall oder Teppich
- Schont den Treppenbelag
- Ergobalance-Griffe für eine sichere Bedienung mit minimalem Kraftaufwand
- Bis zu 300 Stufen Reichweite mit einer Akku-Ladung
- Mit integrierter Sicherheitssensorik


scalamobil®

①

Ihr Rollstuhl erhält eine kleine **Halterung**, in die das scalamobil eingehängt wird. Die Halterung schränkt den Faltmechanismus oder die Verstellmöglichkeiten des Rollstuhls nicht ein.

②

Das **scalamobil** wird mit wenigen Handgriffen in die Rollstuhls Halterung eingehängt und gesichert.

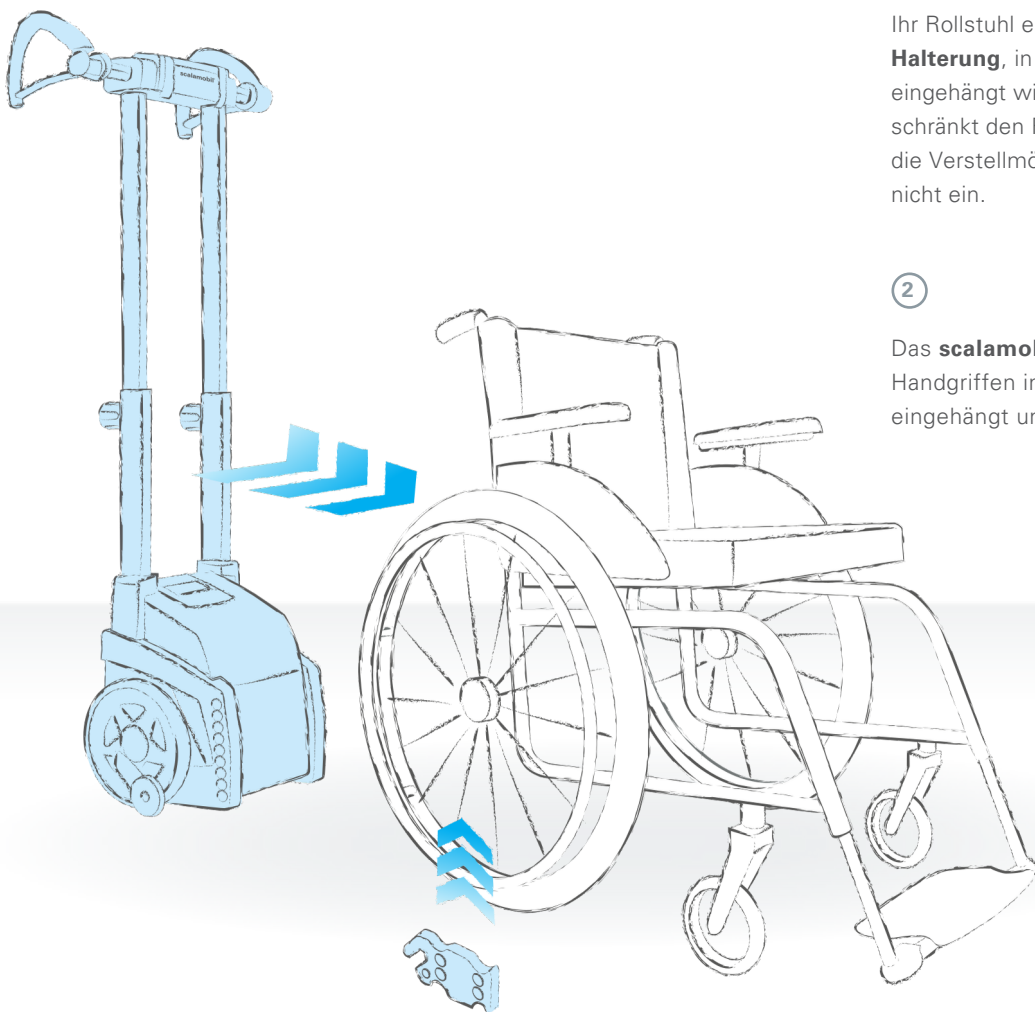

Treppen steigen im eigenen Rollstuhl

Das scalamobil passt an die meisten handelsüblichen Rollstühle. Der große Vorteil: Sie können zum Treppensteigen in Ihrem Rollstuhl sitzen bleiben.



Universal-Adapter scalaport für den Transport unterschiedlicher Rollstühle ohne spezielle Halterung. Besonders für Fahrdienste und öffentliche Gebäude geeignet.



„Auf Knopfdruck Treppen steigen
und das ohne Kraftaufwand.“

scalacombi®

Treppen steigen mit integrierter Sitzeinheit

Sie benötigen Hilfe beim Treppensteigen, aber nicht unbedingt einen Rollstuhl? Der Treppensteiger scalacombi bringt Sie mühelos treppauf und treppab. Die kompakten Abmessungen und die lenkbaren Vorderräder machen das scalacombi äußerst wendig. So lässt es sich selbst in kleinen Räumen und auf engen Treppen bequem rangieren.

Wird das scalacombi gerade nicht benötigt, kann es platzsparend zusammengefaltet werden.

scalamobil und scalacombi sind auch als Sonderversionen für besonders hohe Treppenstufen (bis 25 cm) erhältlich. Für alle Versionen ist ein umfangreiches Zubehörprogramm (z. B. Gurtsysteme, Kopfstützen) verfügbar.



„Sicher und bequem
über jede Treppe – das
ist Lebensqualität.“





scalamobil und scalacombi – die besonderen Stärken

Intelligent und sicher

Höchste Sicherheit und Komfort beim Treppensteigen dank intelligenter Elektronik: scalamobil und scalacombi lassen sich auf die Gegebenheiten Ihrer Treppe zuhause programmieren und steigen dann besonders sanft und bequem.

Bedienungsfreundlich

Dank hervorragender Ergonomie sind alle Bedienelemente genau am richtigen Platz und der Treppensteiger liegt optimal in der Hand. Hier sieht und spürt man die mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung mobiler Treppensteiger bei Alber.





Vielseitig

scalamobil und scalacombi passen sich Ihnen an – nicht umgekehrt. Die Griffeinheit ist in Höhe und Breite optimal für jede Bedienperson und Treppe einstellbar.



Ergobalance-Griffe: rutschsicher und handlich geformt



Übersichtliches Display: alle Funktionen im Blick



Komfortpolster: zum Ablegen der Bedieneinheit auf dem Oberschenkel



Handliche Technik für unterwegs

scalamobil und scalacombi sind überall einsetzbar. Im Handumdrehen lässt sich Ihr Treppensteiger in drei kompakte Einzelteile zerlegen und passt selbst in kleine Kofferräume.

Der mit einem Handgriff entnehmbare Akku-Pack ist 3 kg leicht und bringt mit einer Ladung Energie für bis zu 300 Stufen.



Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

scalamobil und scalacombi auf einen Blick

Gewicht	Antriebseinheit scalamobil: 17,9 kg Antriebseinheit scalacombi (inkl. Sitzeinheit): 29,9 kg Akku-Pack: 3 kg Griffeinheit: 4,9 kg
Reichweite/Akkuladung	Bis zu 300 Stufen mit einer Akkuladung.
Stufenmaße	Stufentiefe mindestens 11 cm Stufenhöhe maximal 20 cm (Optional Erweiterung der Steighöhe auf 25 cm.)
Maximales Personengewicht	140 kg*
Maximales Gesamtgewicht	180 kg* (scalamobil/scalacombi, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

„ Auch unterwegs können wir jetzt jede Treppe bewältigen! “



scalamobil – einfach zu zerlegen
und leicht zu transportieren

scalamobil und scalacombi sind von den Kostenträgern anerkannte **Hilfsmittel** und unter den Positionsnummern **18.65.01.1026 (scalamobil)** und **18.65.01.1027 (scalacombi)** im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

scalamobil und scalacombi sind CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und sind auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach der aktuell gültigen Ausgabe der Produktnorm ISO 7176-28.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.



MADE IN GERMANY ■■■

„Wir haben
das
scalamobil
getestet und
waren sofort
überzeugt.“

Produktvorführung

Kostenlos! Terminvereinbarung unter:



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/scalamobil-testen

scalamobil Produktvideo

Gleich online anschauen:



Youtube



www.alber.de/scalamobil-film



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de





Einfach mobil.

viamobil®

Schiebe- und Bremshilfe



Schieben und Bremsen leicht gemacht.

www.alber.de



TÜV-geprüft
Ihre Sicherheit

„Einfach unterwegs.
Nicht weil wir müssen, sondern
weil wir wollen.“



Mobilität wieder
selbstverständlich machen.
Das ist die Idee.

Alber unterstützt Sie in Ihrer Mobilität

Die Idee hinter viamobil ist so einfach wie clever: Ein elektrischer Zusatzantrieb wird nachträglich an Ihren vorhandenen Rollstuhl angebracht. Der starke Elektromotor entlastet die Begleitperson und verleiht so Ihrer Mobilität neuen Antrieb.

Mit viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen kinderleicht. Große Kraftanstrengungen bei Steigungen, Gefällen oder auch Rampen gehören von nun an der Vergangenheit an. Genießen Sie mehr Unabhängigkeit im Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen.

Denn viamobil ist mit fast jedem Rollstuhl-Typ kombinierbar. Sie wählen einfach den Rollstuhl, der nach therapeutischen Gesichtspunkten am besten zu Ihnen passt, und ergänzen ihn mit dem viamobil. Die Anbringung ist schnell, einfach und ohne Werkzeug oder technische Kenntnisse zu bewerkstelligen. Der Rollstuhl selbst bleibt in seiner Funktion (z. B. Faltbarkeit) in vollem Umfang erhalten, während Sie Ihren Komfort und Ihre Mobilität deutlich steigern.

Sie waren schon immer aktiv. Warum also etwas ändern?

Wir sorgen für den richtigen Antrieb.
Unabhängig von Steigung oder Untergrund.

- Einmal am Rollstuhl angebracht, unterstützt Sie viamobil vielseitig und flexibel in Ihrer Mobilität:
- Steigungen und Gefälle von bis zu 10,2° (18 %) können ohne jeden Kraftaufwand für die Begleitperson bewältigt werden.
 - Wie ein Tempomat hält viamobil bergab die gewünschte Geschwindigkeit konstant ein und muss somit nicht zusätzlich gebremst werden. Das erhöht die Sicherheit auch bei starkem Gefälle.
 - Der kompakte Akku-Pack ermöglicht einen Aktionsradius von bis zu 20 km.
 - Auch im Stand sichert viamobil den Rollstuhl zuverlässig vor dem Wegrollen.

Dank des mittig angebrachten Antriebsrades kann der Rollstuhl ebenso leicht gelenkt und rangiert werden wie ein rein manueller Rollstuhl. Richtungsänderungen werden durch die Schiebegriffe eingeleitet – den Rest erledigt der elektrische Antrieb für Sie.


viamobil passt an fast alle Rollstühle ab einer Sitzbreite von 36 cm – von Standard- bis zu Pflegerollstühlen.

Wir sorgen für Mobilität. Egal in welcher Lage.



„Wenn unsere Enkel was Neues entdecken, wollen wir dabei sein.“

Die viamobil Komponenten

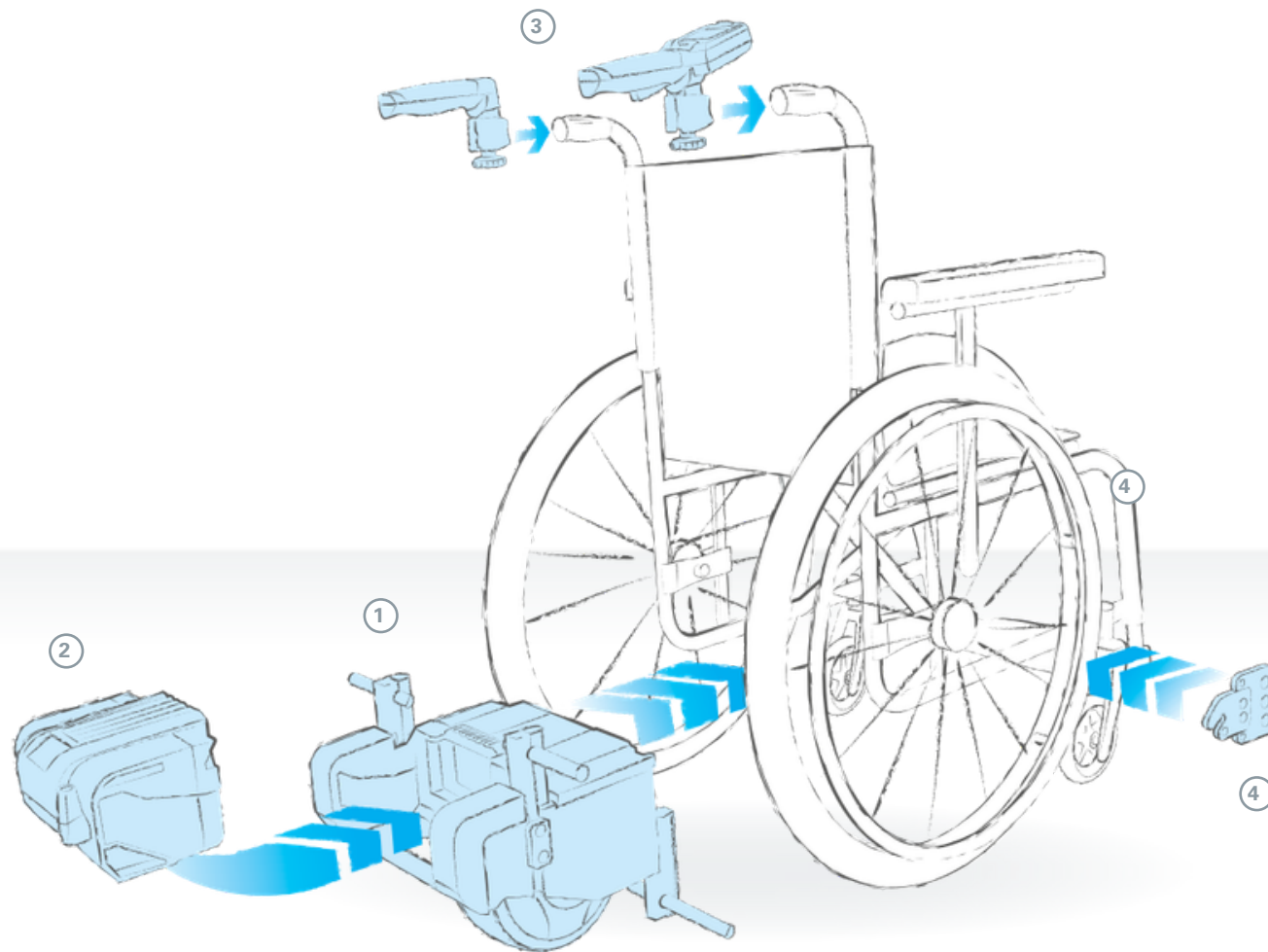

①

KRAFTVOLL – der Motor

bewältigt Steigungen und Gefälle von bis zu 10,2° (18%). Das Antriebsrad ist pannensicher und besonders griffig konstruiert. Damit ist eine sichere Mobilität auch auf unwegsamem Gelände gewährleistet.



②

KOMPAKT – der Akku-Pack

ist dank modernster Batterietechnik besonders handlich und leicht (nur 2,4 kg). Durch die magnetische Positionierungshilfe findet er automatisch seinen Platz und lässt sich nach dem Aufladen einfach und schnell wieder andocken.



③

INTUITIV – das Bediengerät

Das intuitive Bediengerät ist ergonomisch gestaltet und macht die Steuerung sehr bequem und einfach.



④

DEZENT – die Halterung

Zur Aufnahme des viamobil wird lediglich eine kleine Halterung an Ihrem Rollstuhl angebracht.



INTELLIGENT – das Ladegerät

passt in jede Steckdose und schaltet automatisch ab, wenn der Akku-Pack geladen ist.



„Passt perfekt an jeden Rollstuhl und ist einfach zu montieren.“



Komfort konsequent weiterdenken. Beste Voraussetzung für mehr Mobilität.



Ausgezeichnete Produkte erkennt man an ihren cleveren Details.

viamobil zeichnet sich vor allem durch seine einfache und schnelle Handhabung aus. Wie zum Beispiel durch das neue Magnet-Stecker-System EasyConnex: Kein langes Suchen und Stochern mehr, sondern Finden und Einstecken wie von selbst. Durch eine magnetische Positionierungshilfe wird der Stecker automatisch in die richtige Position gezogen. So wie der Akku-Pack, der ebenfalls dank der magnetischen Führung immer die richtige Position findet.



Der Lithium-Ionen-Akku ist besonders leicht und klein. Mit nur 2,4 kg lässt er sich einfach transportieren und ist mit dem automatischen Ladegerät in nur fünf Stunden wieder komplett aufgeladen. Damit hat Ihr viamobil wieder eine Reichweite von bis zu 20 km. Eine besonders lange Lebensdauer und eine 24-monatige Herstellergarantie runden die Sicherheit der mobilen Energieversorgung ab.

Einfach sicher. Einfach mobil. Die intuitive Steuerungstechnik von Alber.

Die einfache und bequeme Handhabung von viamobil wird durch die intuitive Steuerungstechnik gewährleistet. Damit können Begleitpersonen auch längere Strecken ohne Anstrengung zurücklegen. Der ergonomische, rutschfeste Griff sorgt für noch mehr Sicherheit und ist durch den symmetrischen Aufbau für Links- wie auch für Rechtshänder geeignet. Damit Ihr gemeinsamer Spaziergang nicht zu einer Herausforderung, sondern zu einem Genuss wird.

- ① **Ein/Aus Schalter:** Komfort weitergedacht. Beim Einschalten senkt sich das Antriebsrad automatisch ab.
- ② **Batterieanzeige:** Mehr Sicherheit durch Kontrolle. Klare Übersicht, wie lange Sie noch fahren können.
- ③ **Geschwindigkeitsvorwahl:** Passen Sie die Geschwindigkeit an Ihre Bedürfnisse an und nicht umgekehrt.
- ④ **Fahrtrichtungsschalter:** Einfach die Fahrtrichtung per Schalter wählen und per Anzeige kontrollieren. Mehr Komfort geht nicht.
- ⑤ **Fahrhebel:** Wenn der Fahrhebel gezogen wird, kann die Fahrt beginnen. Beim Loslassen bremst viamobil sanft und sicher ab.



Einfach. Sicher. Schnell. So funktioniert es:



viamobil einfach in die zuvor am Rollstuhl montierte Halterung einhängen.



Mit nur einem Griff den Akku-Pack einlegen. Einfach und sicher.



Der Stecker des Bediengerätes verbindet sich magnetisch mit dem Akku.



„Wir sind dann mal kurz weg.
Warum auch nicht?“



viamobil – klein, leicht, handlich
und mühelos zu transportieren

Handliche Technik für unterwegs

viamobil lässt sich einfach und komfortabel auch in kleineren Autos transportieren. Die einzelnen Module sind leicht und robust und verfügen über praktische Tragegriffe, mit denen man sie schnell verladen kann. Dank Schnellverschlüssen können Sie viamobil ohne Werkzeug oder handwerkliche Kenntnisse abnehmen, zusammen mit dem Rollstuhl platzsparend verstauen und dann mit wenigen Handgriffen wieder betriebsbereit machen.



Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

Auf viamobil ist Verlass

viamobil ist ein Produkt von Alber, dem Spezialisten für besonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen. Unabhängige Institutionen haben viamobil auf Langlebigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit getestet und positiv bewertet.

An erster Stelle stehen für uns Sicherheitsprüfungen – zum Beispiel durch den TÜV: Sie erhalten bei Alber stets geprüfte Produktsicherheit nach den aktuellsten Richtlinien für Medizinprodukte.



MADE IN GERMANY 

viamobil V25 auf einen Blick

Gewicht	Antriebseinheit: 10,3 kg Akku: 2,4 kg Bediengerät: 0,6 kg
Geschwindigkeit	1 bis 5,5 km/h
Reichweite	Bis zu 20 km
Maximale Steigung bzw. Gefälle	Bis zu 10,2° (18%). Aus Sicherheitsgründen ist ab 4,5° (8%) die Verwendung von Kippstützen für den jeweiligen Rollstuhl vorgeschrieben.
Maximales Personengewicht	160 kg*
Maximales Gesamtgewicht	210 kg* (viamobil, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

Das viamobil ist ein von den Kostenträgern anerkanntes **Hilfsmittel** und unter der Positionsnummer **18.99.04.1023** im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

Das viamobil ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und ist auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach der aktuell gültigen Ausgabe der Produktnorm EN 12184.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

„Wir haben das viamobil getestet und waren sofort überzeugt.“

Produktvorführung

Kostenlos! Terminvereinbarung unter:



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/viamobil-testen

viamobil Produktvideo

Gleich online anschauen:



Youtube



www.alber.de/viamobil-film



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de





Einfach mobil.

viamobil® eco

Schiebe- und Bremshilfe



Damit Schieben
einfach wird.

www.alber.de

„Endlich wieder
gemeinsam
unterwegs – und
so einfach!“



Alles im Griff

Alle Funktionen werden mit einem handlichen, griffigen Drehknopf gesteuert, der mit einer Hand zu bedienen ist – für optimalen Bedienkomfort von Anfang an.



Daumenbedienung

Zum Vorwärtsfahren wird einfach der Fahrhebel am ergonomisch geformten Bediengerät mit dem Daumen leicht nach unten bewegt. So können auch längere Spaziergänge ermüdungsfrei absolviert werden. Zum Rückwärtsfahren wird der Fahrhebel nach oben gezogen.



Bequem und sicher

Die pneumatische Federung des viamobil eco gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine bequeme Fahrt. Die Federung sorgt zudem für einen konstanten Anpressdruck und somit für ein sicheres Fahrverhalten bergauf und bergab.

Die neue Leichtigkeit des Schiebens

So leicht kann Schieben und Bremsen sein

Ob bergauf oder bergab, ob an steilen Rampen, Auffahrten oder bei längeren Wegstrecken: viamobil eco, die elektrische Schiebe- und Bremshilfe für Rollstühle, bietet Begleitpersonen beim Schieben des Rollstuhls bedarfsgerechte Unterstützung.



Auch bergab ein sicherer Begleiter

Bei Fahrten mit Gefälle bietet die automatische Bremsfunktion ein großes Plus an Sicherheit. Die intelligente Federung sorgt für Komfort und ein ruhiges Fahrgefühl. Sie gleicht Unebenheiten der Fahrbahn automatisch aus und sorgt so für sichere Bodenhaftung.

Diese Vorteile entlasten nicht nur die Begleitperson, sondern ermöglichen mehr Selbstbestimmung und leisten einen wertvollen Beitrag zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Die viamobil eco Komponenten:

①


Die ergonomisch gestaltete **Griffeinheit** mit dem breiten Lenker ermöglicht das einfache und ermüdungsfreie Bedienen des viamobil eco auch auf längeren Fahrten.

②

Der kompakte **Akku-Pack** mit integrierter Ladebuchse kontaktiert ganz einfach ohne Stecker und Kabel mit dem Antrieb.

③

Der kräftige **Motor** bewältigt Steigungen und Gefälle von bis zu 10 %. Eine pneumatische Federung sorgt für optimalen Bodenkontakt der pannensicheren Antriebsräder und erhöht den Fahrkomfort.

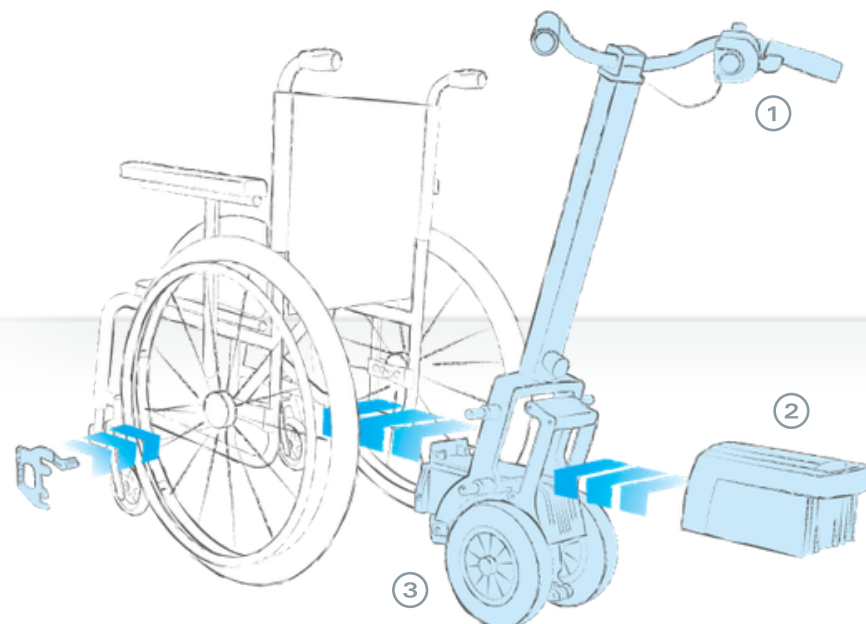

Einfach einfach – das ist das viamobil eco

So leicht kann Rollstuhlschieben sein – das bestätigt der TÜV. Unter der Federführung des TÜV wurde mit Anwendern die Bedienerfreundlichkeit des viamobil eco erfolgreich in der Praxis getestet. Es wurde mit dem Prädikat „Einfach zu bedienen“ ausgezeichnet.

Passt an Ihren Rollstuhl

viamobil eco ist mit vielen Standard-Rollstühlen kombinierbar und dank der durchdachten Ankoppel-Vorrichtung mühelos ohne Werkzeug an den Rollstuhl anzubringen. Der Rollstuhl selbst bleibt in seiner Funktion (z. B. Faltbarkeit) in vollem Umfang erhalten, während Sie Ihren Komfort und Ihre Mobilität deutlich steigern.

Ideal zu transportieren

In Sekundenschnelle lässt sich viamobil eco ohne Werkzeug in drei handliche Teile zerlegen und passt so in jeden Kofferraum.



MADE IN GERMANY

Das viamobil eco ist ein von den Kostenträgern anerkanntes **Hilfsmittel** und unter der Positionsnummer **18.99.04.1012** im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

Das viamobil eco ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und ist auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft, nach der aktuell gültigen Ausgabe der Produktnorm EN 12184.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.

viamobil eco V14 auf einen Blick

Zuladung:	120 kg (Personengewicht)**
Geschwindigkeit:	stufenlos regelbar 1–5,5 km/h
Reichweite:	12 km* 5,7° (10 %) Akku-Pack
Steigfähigkeit:	Antrieb Griffeinheit max. 170 kg**
Gewicht:	5,7 kg 10,5 kg 2,0 kg
Gesamtgewicht:	(viamobileco, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

* in Abhängigkeit von der Zuladung, dem Geländeprofil und der Umgebungstemperatur nach ISO 7176-4.

** In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

„Wir haben
das viamobil
eco getestet
und waren
sofort
überzeugt.“

Produktvorführung

Kostenlos! Terminvereinbarung unter:



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/viamobil-eco-testen

viamobil eco Produktvideo

Gleich online anschauen:



Youtube



www.alber.de/viamobil-eco-film



seit
1988

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Stegemannstraße 5 – 7
56068 Koblenz

Telefon: 0261 13388-0
Telefax: 0261 13388-22

 **www.burbach-goetz.de**

 **info@burbachgoetz.de**



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de

