



CAREPUR

For a human Life.

POSITIONIERUNGS- RATGEBER

**Informationen für Pflegekräfte
und pflegende Angehörige**

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	3 - 4	9 Produktübersicht	40 - 43
2 Der ganze Körper	5 - 11	CAREPUR Beinpositionierungsset	40
3 Der Kopf	12 - 13	CAREPUR Beinpositionierung	
4 Der Oberkörper	14 - 15	Kompakt	41
5 Die Arme	16 - 17	CAREPUR Positionierungsset I	42
6 Die Beine	18 - 26	CAREPUR Positionierungsset II	43
komplette untere Extremität	18 - 19	10 Weitere Produkte	44 - 45
Knie	20 - 21	Matratzen	44
Unterschenkel	22 - 24	Sitzkissen	45
Fersenfreilagerung	25 - 26	11 Fremdwortverzeichnis	46
7 Mikrolagerung	27 - 28	12 Material, Reinigungs- hinweise, Impressum	47
8 Im Rollstuhl	29 - 30		
9 Produktübersicht	31 - 39		
Textilbezüge	31		
Seitenlagerungskissen	32		
Universalkissen, Deltakissen,			
Halbmondkissen	33		
Semi-Fowler-Kissen	34		
Zylinderkissen, Ringkissen,			
Abduktionskissen	35		
Fersenfreilagerung	36		
Fersenentlastungsgurt,			
Hemi-Armkissen	37		
Rückenlagerungskissen	38		
Mikrolagerung,			
Universallagerungsset	39		



Service- und Bürozeiten

Mo.-Fr.: 7.³⁰ Uhr - 17.⁰⁰ Uhr

Telefon: +49 33678 - 40 77 00

Telefax: +49 33678 - 40 77 29

E-Mail: info@s-h-p.eu

Web: www.s-h-p.eu

Personen, die sich täglich um Menschen mit Pflegebedarf kümmern, übernehmen ein großes Spektrum verschiedener Aufgaben, um den Bedürfnissen und Anforderungen der zu pflegenden Person gerecht zu werden. Die Erhaltung und Förderung der Mobilität in Verbindung mit der Prophylaxe von Dekubitalulzerationen ist eine dieser Aufgaben, die in dieser Broschüre betrachtet werden soll. Die Wahl der richtigen Hilfsmittel, die sowohl beim Pflegebedürftigen Wohlbefinden auslösen als auch dem Pflegenden die Arbeit erleichtern, spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Eine neue Erfahrung

Immobilität und die Abhängigkeit von Pflegekräften im Bereich Bewegung ist für viele Patienten/Bewohner eine existenzielle Erfahrung, der mit Einfühlungsvermögen und Verständnis seitens der Pflegenden begegnet werden muss.

Die Intervalle zwischen den Bewegungsförderungen bzw. Positionsveränderungen sind abhängig von:

- dem individuellen Dekubitusrisiko des Patienten/Bewohners,
- den therapeutischen und pflegerischen Zielen,
- den individuellen Möglichkeiten und der Eigenbewegung des Patienten/Bewohners.

Die richtigen Hilfsmittel nutzen

Druckverteilende Hilfsmittel reduzieren die auf ein bestimmtes Areal einwirkende Belastung. Jeder Patient/Bewohner bringt andere Voraussetzungen in die pflegerische Situation mit ein (u. a. körperliche und psychische Konstitution). Diese müssen bei der Auswahl des geeigneten Hilfsmittels berücksichtigt werden.

Die einzusetzenden Hilfsmittel zur Druckverteilung sollen nach folgenden Kriterien ausgewählt werden:

- den prioritären Pflege- und Therapiezielen,
- den Möglichkeiten der Eigenbewegung des Patienten/Bewohners,
- den gefährdeten Körperstellen,
- dem Gewicht des Patienten/Bewohners,
- den Präferenzen und Wünschen des Patienten/Bewohners,
- der Abwägung von Kosten und Nutzen.

Vorwort

Dekubitusgefährdete Patienten/Bewohner müssen unverzüglich nach der Risikoerkennung eine entsprechende Prophylaxe – primär eine Druckentlastung (z. B. Positionswechsel, Bewegungsförderung) – erhalten. Ist die Druckentlastung nicht möglich bzw. nicht ausreichend, sollten ergänzend druckverteilende Hilfsmittel eingesetzt werden.

Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe müssen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Ziel der prophylaktischen Maßnahmen ist die Vermeidung des Auftretens von Dekubitus.

i

Produktlinie zur Patientenpositionierung



For a human Life

CAREPUR-Lagerungskissen sind als statische Positionierungshilfen für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung geeignet. Sie wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützen je nach Kissentyp bei der Lagerung und Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen.



Der ganze Körper



i

Eine pflegerische Unterstützung der Positionswechsel bis hin zur vollständigen pflegerischen Übernahme der Durchführung ist dann erforderlich, wenn Patienten/ Bewohner nicht mehr in der Lage sind, selbstständig für eine regelmäßige Druckentlastung zu sorgen bzw. die von ihnen ausgeführten Bewegungen keine ausreichende Druckentlastung bieten (Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege vom DNQP, 2. Aktualisierung).


Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Positionierungsunterstützung in Rückenlage, in 30°–40° seitlicher Lagerung rechts oder links und 135°-Lagerung.

Die individuelle Positionierung kann dabei entweder mit nur einem Positionierungskissen oder durch sinnvolle Kombination verschiedener Kissen erfolgen, um den gesamten Körper sicher und lagestabil zu positionieren und bestimmte Bereiche des Körpers explizit freizulagern.

Seitenlagerungskissen M

30°-Lagerung


Das Seitenlagerungskissen erhöht den Oberkörper und die Hüfte einseitig. Oberschenkel, Knie und Unterschenkel derselben Seite werden wirksam gestützt und eine Freilagerung der Ferse ermöglicht.

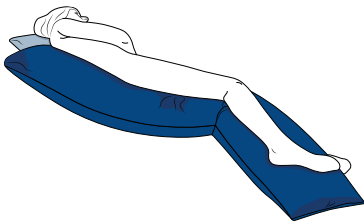

Rückenlagerungskissen M

30°-Lagerung

Auch das Rückenlagerungskissen ermöglicht eine lagestabile seitliche Positionierung.

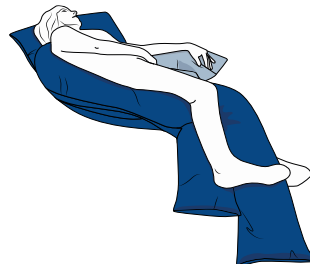


Der ganze Körper



Seitenlagerungskissen M

135°-Lagerung


Das Seitenlagerungskissen eignet sich ebenfalls für die Durchführung einer 135°-Lagerung, bei der der Patient/Bewohner durch die Positionierungshilfe sicher gestützt wird und die Sakralregion komplett freigelagert wird.

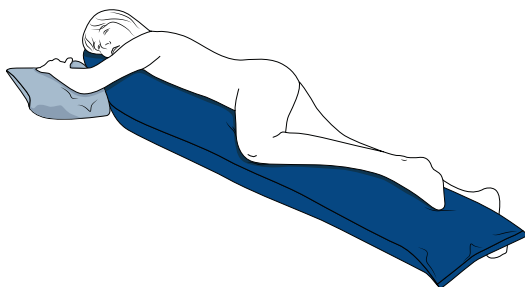

Rückenlagerungskissen M

Rückenlagerung

Die Anwendung des Rückenlagerungskissens bewirkt eine Unterfütterung, Weichlagerung und Positionierung des gesamten Körpers und ermöglicht die Freilagerung individuell definierter Bereiche zur lokalen Druckreduzierung.

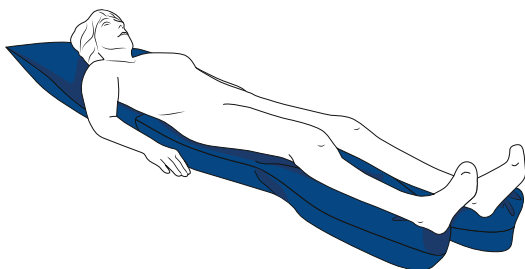


Die bisher beschriebenen Positionierungsmöglichkeiten sind auch durch die Kombination verschiedener CAREPUR-Lagerungskissen möglich. Im Folgenden zeigen wir Ihnen exemplarisch individuelle Kombinationsbeispiele.

Der ganze körper

Universalkissen S, Deltakissen M, Universalkissen M

30°-Lagerung


Rücken und Becken werden vom Deltakissen gestützt, der Kopf vom Universalkissen S sicher positioniert, die Knie durch ein Universalkissen M abduziert und der erhöht positionierte Unterschenkel weich gelagert.

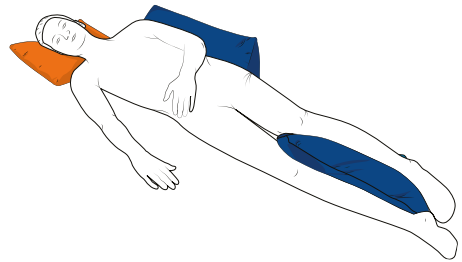

Universalkissen S, Zylinderkissen M, Universalkissen M

30°-Lagerung


Das Zylinderkissen stützt Rücken und Becken in der seitlichen Positionierung und das Universalkissen lagert das komplette Bein weich und die Ferse frei.

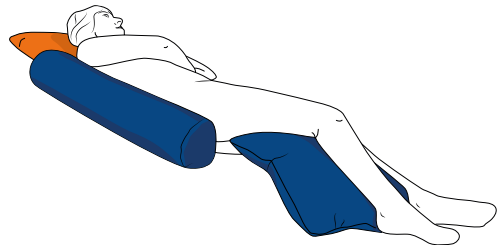

Universalkissen S, Halbmondkissen M, Fersenfreilagierung M

30°-Lagerung

Das Halbmondkissen wirkt stützend im Rücken- und Beckenbereich, positioniert den Oberschenkel und sorgt für eine sichere Abduktion im Kniebereich.

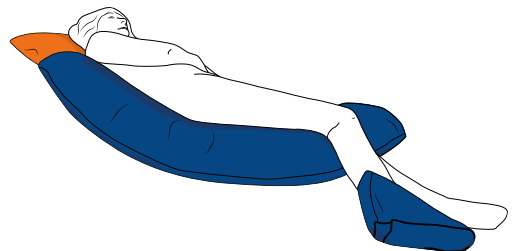


Der ganze körper



Universalkissen S, Universalkissen M, Zylinderkissen M, Fersenfreilagerung M

30°-Lagerung

Der Rücken wird durch ein Universal-
kissen M gestützt, das oben liegende
Bein durch ein Zylinderkissen sicher
positioniert sowie Außenknöchel und
Ferse des unteren Fußes durch die
Fersenfreilagerung geschützt.

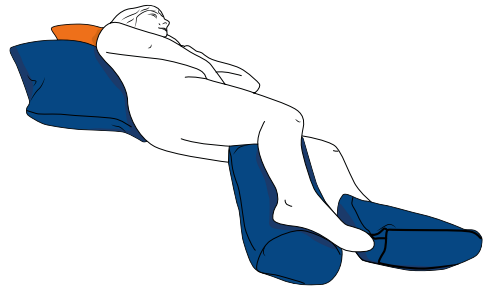

Halbmondkissen M, Semi-Fowler-Kissen M, Fersenentlastungsgurt

Rückenlagerung

Bei dieser Anwendung führt das Semi-
Fowler-Kissen die Oberschenkel,
unterfüttert die Knie, gewährleistet eine
Abduktion im Kniebereich und entlastet so
den Sakralbereich. Das Halbmondkissen
stützt Kopf und Oberkörper und fördert
die Eigenwahrnehmung des Patienten.




Der ganze Körper



Semi-Fowler-Kissen M, Abduktionskissen M, Zylinderkissen M, Fersenentlastungsgurt

Rückenlagerung


Die Unterfütterung und leichte Winkelung der Knie wird durch ein Zylinderkissen M erreicht, die Fersen durch einen Entlastungsgurt freigelagert.

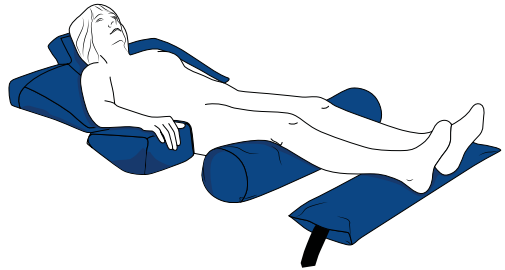

Semi-Fowler-Kissen M, Universalkissen S, Abduktionskissen M, Universalkissen M, Zylinderkissen M

Rückenlagerung

Hier wird die Positionierung in Rückenlage durch fünf unterschiedliche CAREPUR-Lagerungskissen unterstützt.

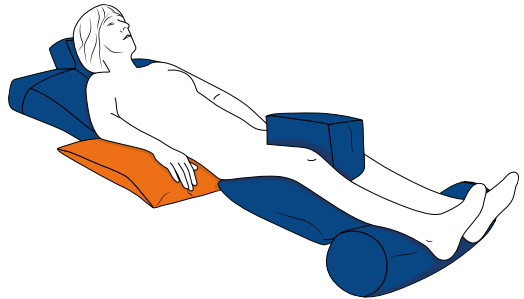


Der ganze Körper

Semi-Fowler-Kissen M, Universalkissen S, Deltakissen M, Fersenentlastungsgurt

Rückenlagerung


Mit dem Semi-Fowler-Kissen werden Kopf und Schultern positioniert. Das Deltakissen unterfüttert die Beine, entspannt die Bauchmuskulatur und entlastet den Sakralbereich. Die Fersen werden vom Entlastungsgurt freigelagert und ein Arm vom Universalkissen S erhöht positioniert und weichgelagert.

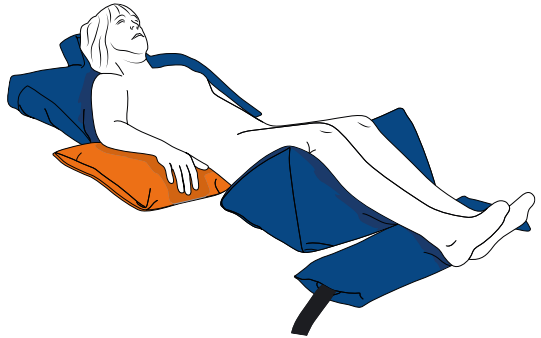

Universalkissen S, Universalkissen M, Zylinderkissen M

135°-Lagerung

Das Universalkissen M stützt den Oberkörper des Patienten/ Bewohners thorakal ab und durch das Zylinderkissen wird das leicht angewinkelte Bein sicher positioniert.

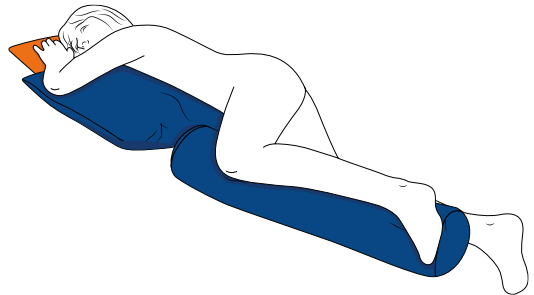


Der ganze Körper

Universalkissen S, Deltakissen M, Zylinderkissen M

135°-Lagerung


Hier erfolgt die Abstützung im Brust- und Bauchbereich durch ein Deltakissen M. Das oben liegende Bein wird durch ein Zylinderkissen M sicher und lagestabil positioniert.

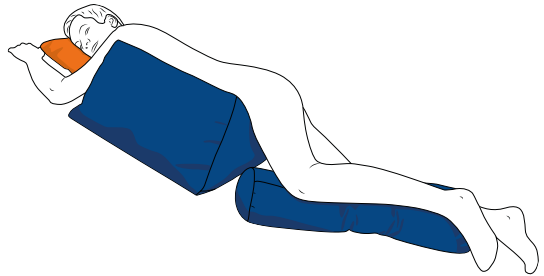

Zylinderkissen S, Halbmondkissen M

135°-Lagerung

Das Halbmondkissen kann auch bei der Durchführung der 135°-Lagerung Anwendung finden. Es stützt thorakal und positioniert das Bein. Der Kopf wird durch ein Zylinderkissen S in seiner Lage stabilisiert.

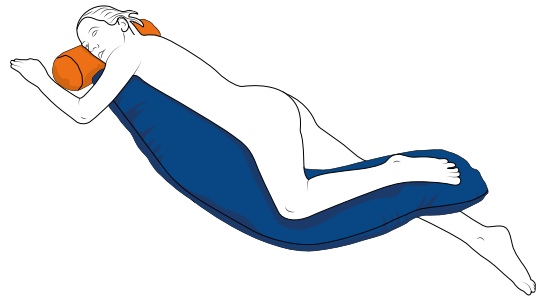

Universalkissen S, Zylinderkissen M, Universalkissen M

135°-Lagerung

Das Zylinderkissen M dient zur thorakalen Abstützung, die Beinpositionierung wird durch das Universalkissen gewährleistet. Ein Universalkissen S positioniert den Kopf.




Der Kopf



Ringkissen M

30°-Lagerung

Der Kopf sollte in Seitenlage so positioniert sein, dass sich die Wirbelsäule im Bereich der unteren Halswirbelsäule in Neutralstellung befindet.

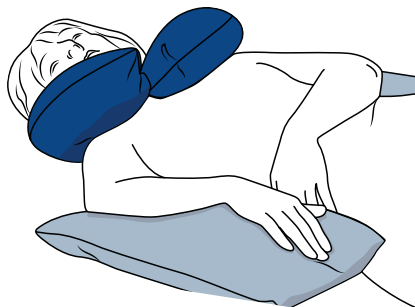

Ringkissen M

in Rückenlage


In der Rückenlage wird der Kopf so positioniert, dass sich die Halswirbelsäule in Mittelstellung/ Neutralstellung befindet, der Hals aufliegt und unterstützt wird.



Ringkissen M

135°-Lagerung

Wenn der Kopf durch das Ringkissen sicher positioniert ist, kann sich der Pflegende mit beiden Händen der Bewegungsförderung des Patienten/ Bewohners widmen.

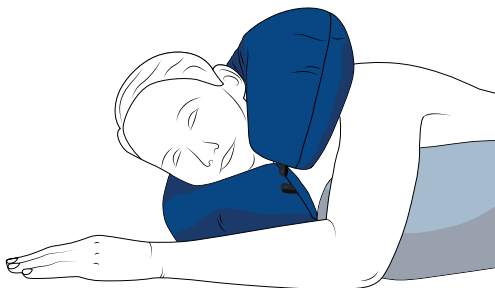


Der Kopf

Halbmondkissen M

Rückenlagerung

Das Halbmondkissen M positioniert Kopf und Schultern mit nur einem Kisselement in Rückenlage.

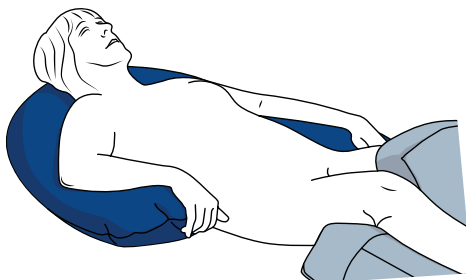

Universalkissen M

Rückenlagerung

(auch möglich für 30° - und 135° - Lagerung)


Kopf und Hals werden in Rückenlage mit dem Universalkissen M sicher und entspannt positioniert.



Semi-Fowler-Kissen M

Rückenlagerung

Das Semi-Fowler-Kissen verhindert wirksam die Überstreckung des Kopfes, und verbessert die Eigenwahrnehmung des zu Pflegenden.

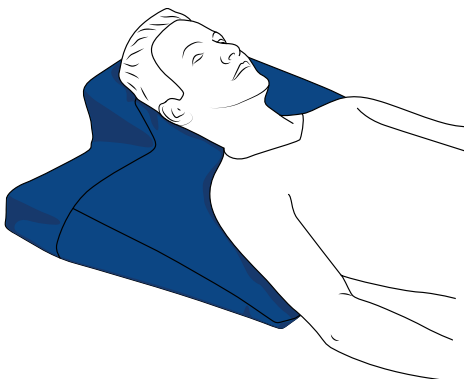

Der Oberkörper




Zylinderkissen M

Die längliche Rollenform des Zylinderkissens bewirkt eine lagestabile Positionierung des Oberkörpers bei der 30° - und der 135° - Lagerung.



Universalkissen M

Das Universalkissen stützt den Oberkörper in der 30° - Lagerung sicher ab.

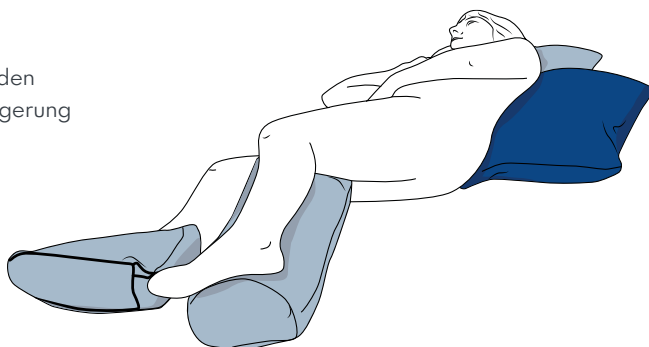


Der Oberkörper




Deltakissen M

Das Deltakissen eignet sich aufgrund seiner triangulären Form gut zur thorakalen Abstützung bei der 30°-Seitenlagerung und der 135°-Lagerung.

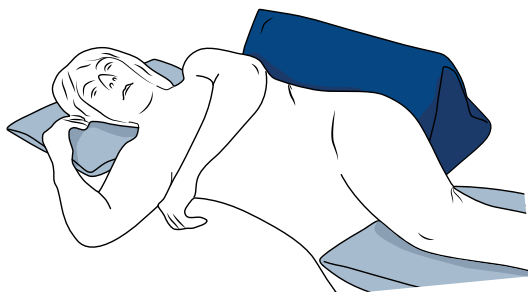

Universalkissen M

Das Universalkissen stützt den Oberkörper in der 135°-Lagerung sicher ab.

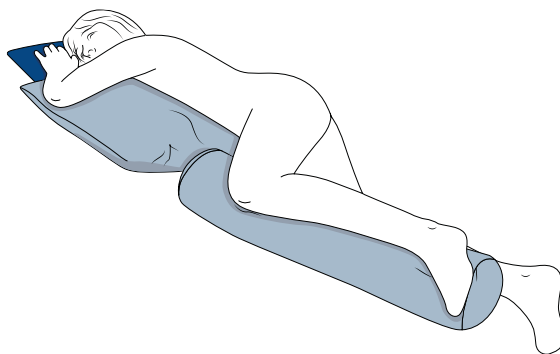

Die Arme



Universalkissen S

Rückenlagerung


Der Ellenbogen wird physiologisch leicht gebeugt gelagert und der Unterarm wird geführt. Es ist zu beachten, dass auf den Ellenbogen bzw. Nervus ulnaris kein Druck ausgeübt wird.



Universalkissen S

30°-Lagerung

Der Arm wird möglichst in Neutralstellung positioniert, um Überstreckungen zu vermeiden.

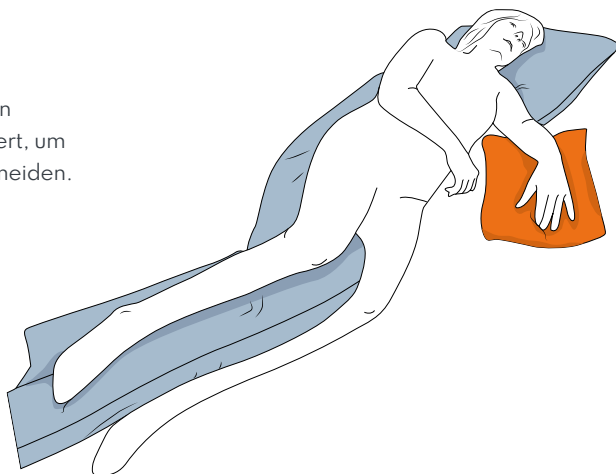

Die Arme

Abduktionskissen S

Rückenlagerung


Eine kontrakturprophylaktische Abduktion des Oberarms zur Erreichung einer physiologischen Armpositionierung und Weichlagerung des Unterarmes wird durch das Universalkissen S erzielt.



Abduktionskissen M

Rückenlagerung

Das Abduktionskissen ermöglicht eine leicht erhöhte Führung des Unterarmes und ermöglicht die Freilagerung des Ellenbogens.

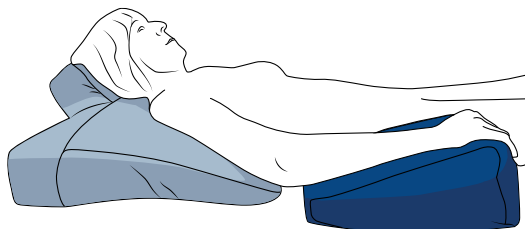


Die Beine

komplette untere Extremität

CAREPUR Beinpositionierung Basis+Modul

Rückenlagerung

Die Oberschenkel werden leicht erhöht geführt, der Kniebereich unterfüttert und der Sakralbereich entlastet. Das Unterschenkelmodul positioniert die Unterschenkel und gewährleistet die vollständige Entlastung der Fersen durch Freilagerung.

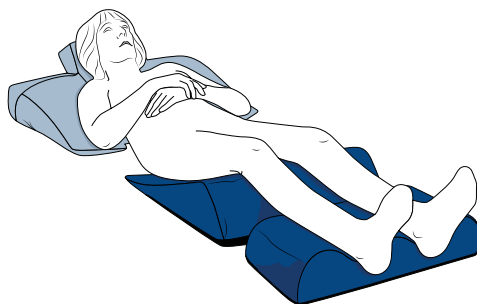

Semi-Fowler-Kissen M

Rückenlagerung

Das Semi-Fowler-Kissen im Bereich der Oberschenkel und Knie eingesetzt, unterfüttert diese und gewährleistet eine Abduktion im Kniebereich.




Die Beine

komplette untere Extremität

Halbmondkissen M

Rückenlagerung

Das Halbmondkissen positioniert Oberschenkel und Knie, fördert die Wahrnehmung im Bereich des Beckens und ermöglicht eine leicht erhöhte physiologische Armlagerung.

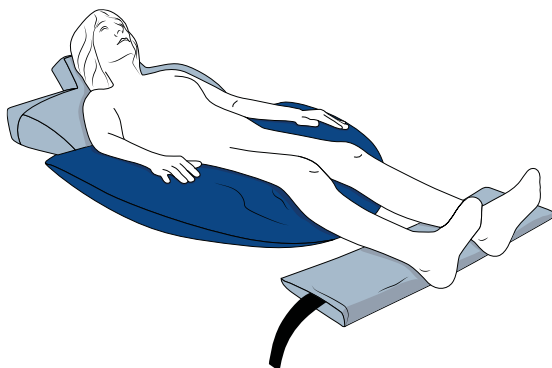


Die Beine

Knie

Deltakissen M

Rückenlagerung


Die trianguläre Form des Deltakissens bewirkt die Unterfütterung der Knie, die erhöhte Führung der Oberschenkel und entspannt so die Bauchdecke.

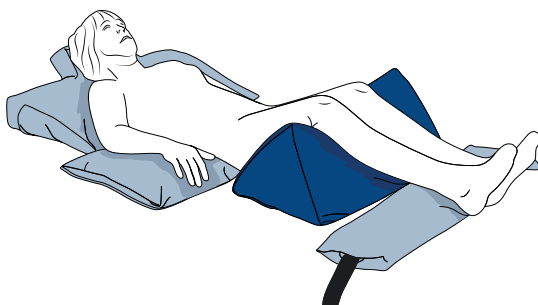

Zylinderkissen M

Rückenlagerung


Die Anwendung des Zylinderkissens unter den Knien verhindert eine Überstreckung der Beine und ermöglicht eine komfortable Beinpositionierung.

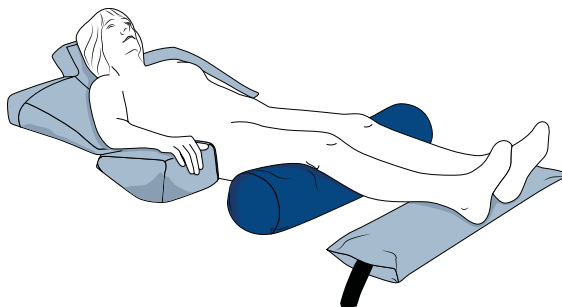

Universalkissen M in Verbindung mit Abduktionskissen M

Rückenlagerung

Das Universalkissen M unterfüttert die Knie und verhindert ein Überstrecken der Beine. Das Abduktionskissen verbessert die achsengerechte Beinführung und beugt Kontrakturen im Bereich der Knie vor.

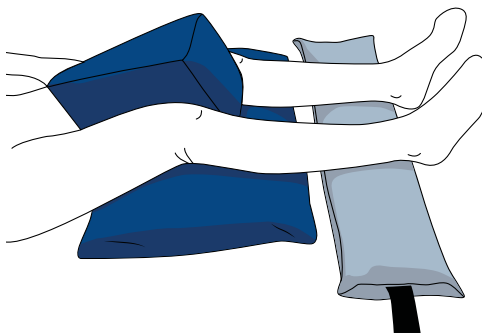

Die Beine

Knie



Universalkissen M

30°-Lagerung

Das Universalkissen zwischen den Knien verhindert das direkte Aneinanderliegen und bewirkt eine physiologische Beinstellung.



Universalkissen M, Universalkissen S

Rückenlagerung

Durch die Anwendungskombination beider Universalkissen kann eine komplette Beinlagerung mit Freilagerung der Fersen erreicht werden.




Die Beine

Unterschenkel

Universalkissen M

30°-Lagerung


Mit dem Universalkissen M wird ein Aneinanderliegen der Knieinnenseiten sicher verhindert und eine stabile Führung und Positionierung des oben liegenden Unterschenkels erreicht.

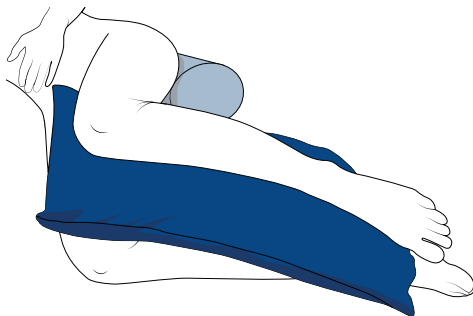

Zylinderkissen M

30°-Lagerung


Das rollenförmige Zylinderkissen positioniert das gesamte oben liegende Bein.

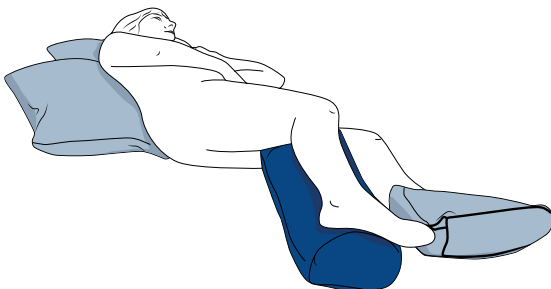

Beinpositionierung Kompakt

Rückenlagerung

Die Beine werden durch das Kissen erhöht und lagestabil positioniert, der venöse Rückstrom wird verbessert und die Fersen werden freigelagert.

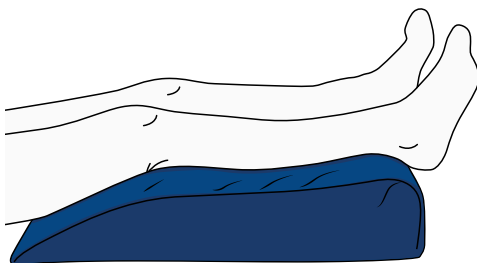


Die Beine

Unterschenkel

Semi-Fowler-Kissen M

Rückenlagerung


Das Semi-Fowler-Kissen sorgt für die Unterfütterung und Abduktion der Knie, führt die Unterschenkel und gewährleistet die Fersenfreilagerung.

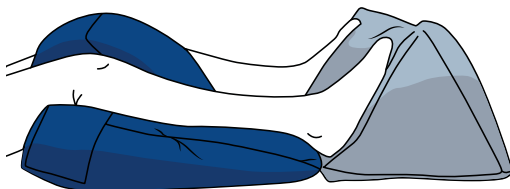

Universalkissen M

Rückenlagerung

Mit dem Universalkissen M kann auch ein Bein erhöht gelagert werden, um die dekubitusgefährdete Ferse druckentlastend freizulagern.

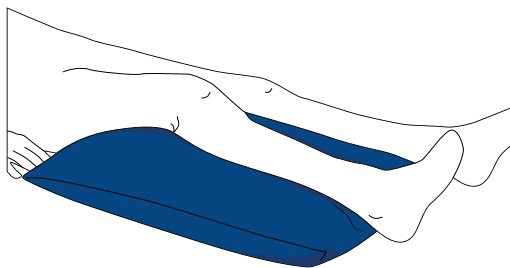

Die Beine

Unterschenkel

Zylinderkissen M

135°-Lagerung

Durch die Verwendung des Zylinderkissens im Bereich von Knie und Unterschenkel wird eine lagestabile Positionierung und eine Weichlagerung erreicht.



Universalkissen M

135°-Lagerung

Das Universalkissen M stützt Knie und Unterschenkel sicher.



Die Beine

Fersenfreilagerung

Fersenentlastungsgurt


Rückenlagerung, auch möglich für Seitenlagerung

Der Fersenentlastungsgurt kann unter der Matratze fixiert und somit gegen Verrutschen gesichert werden und dient zur Druckentlastung im Bereich der Fersen durch Freilagerung.



Fersenfreilagerung M

Das schuhförmige Kissen schützt innere und äußere Fußknöchel. Verstärkt unterfütterte Bereiche der Fußsohle und des Achillessehnenansatzes sorgen für eine Freilagerung der Ferse.

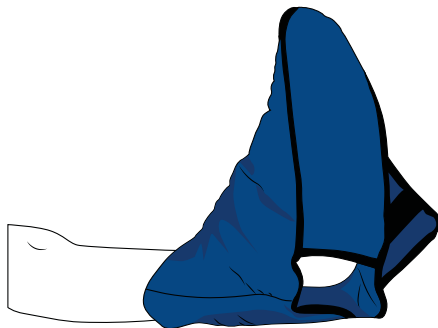


Die Beine

Fersenfreilagerung

Zylinderkissen M

Rückenlagerung


Das Zylinderkissen lagert in Anwendungskombination die Fersen frei.

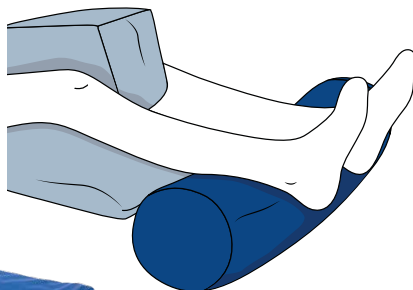

Semi-Fowler-Kissen M, Deltakissen M

Rückenlagerung

Die Anwendungskombination von Semi-Fowler-Kissen und Deltakissen ermöglicht ebenfalls eine effiziente Spitzfußprophylaxe durch Positionierung.

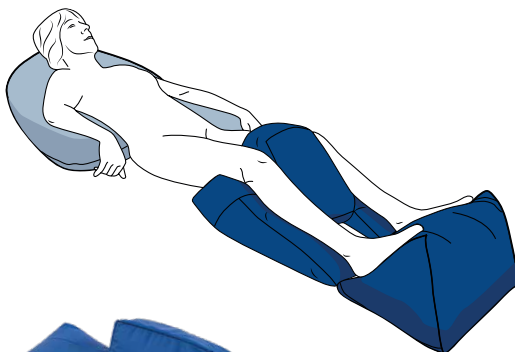

Mikrolagerung



i

Die Mikrolagerung dient der physiologischen Positionsveränderung in den Gelenken sowie zur unterstützenden Lageveränderung durch Druckumverteilung an Kopf, Hals, Schultern, Thorax, Becken, Ober- und Unterschenkel oder im Fersenbereich.


Dazu wird das Kissen vollflächig unter der zu entlastenden Körperpartie platziert und dort für die Dauer von ca. 10-15 Minuten belassen. Danach wird es entfernt und an einer anderen zu entlastenden Körperregion eingesetzt.

Häufigkeit und Kontinuität in der Nachahmung physiologischer Bewegungsmuster durch kleinste Schwerpunktverlagerungen sind von entscheidender Bedeutung, um eine dekubitusprophylaktische Wirkung zu erzielen und die Verbesserung der natürlichen Blutzirkulation im Gewebe zu gewährleisten.

Mikrolagerungskissen

Rückenlagerung

Druckänderungen in den betreffenden Körperarealen durch kleinste Schwerpunktverlagerungen.

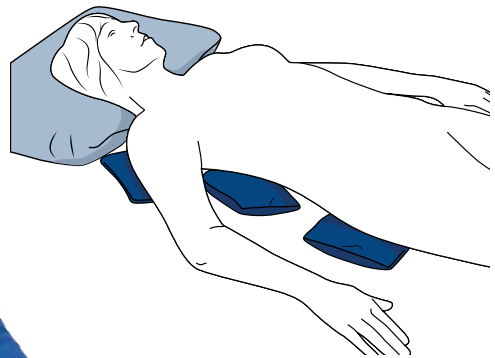

Mikrolagerung



Mikrolagerungskissen

Rückenlagerung

Physiologische Positionsveränderung im Knie- und Sprunggelenksbereich.



Mikrolagerungskissen

Rückenlagerung

Unterstützende
Lageveränderung im Bereich
der Schulter, des Beckens und
des Unterschenkels.



Anwendungsbeispiel

Mikrolagerungskissen zur zeitlich
begrenzten Druckumverteilung

Im Rollstuhl



i



CAREPUR-Lagerungskissen dienen ebenfalls zur Positionierungsunterstützung bestimmter Körperareale durch Anwendung im Rollstuhl bzw. bei allgemeinen Sitzpositionen.

Hemi-Armkissen M

im Rollstuhl

Das spezielle zweiteilige **CAREPUR** Hemi-Armkissen ermöglicht die individuelle Positionierung eines paretischen Armes im Rollstuhl. Der komplette Unterarm und der Ellenbogen werden weichgelagert und sinken leicht in die Kissenstruktur ein.

Es entlastet wirksam durch Reduzierung der Zugkräfte das betreffende Schultergelenk. Beide Teile des Kissens werden sicher durch Klettband miteinander verbunden und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten.

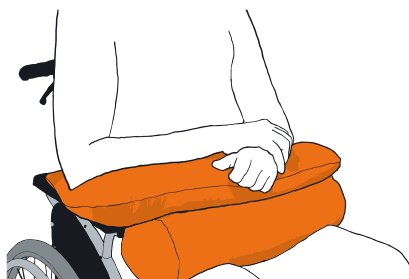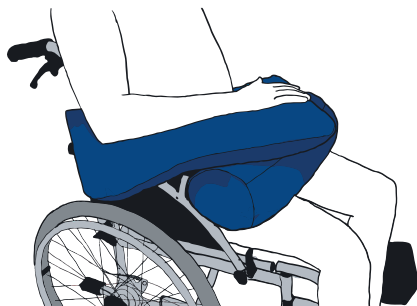

Im Rollstuhl



Semi-Fowler-Kissen S

im Rollstuhl

Das Semi-Fowler-Kissen ermöglicht bei nebenstehender Anwendung ebenfalls die sichere und druckentlastende Positionierung eines Armes und gewährleistet gleichzeitig eine Abduktion im Kniebereich zur Reduzierung des Druckrisikos durch aneinanderliegende Knieinnenseiten.



Abduktionskissen S

im Rollstuhl

Das Abduktionskissen dient der seitlichen Wegführung bzw. dem Abspreizen einer Extremität von der Körpermitte. Es trägt so zu einer physiologischen Beinstellung bei und verhindert das kontrakturbedingte Aneinanderliegen der Knie.



Produkt übersicht



Textilbezug

Bezüge zu den CAREPUR-Artikeln



Farbe Bestellnr. Bezeichnung

B43835	Textilbezug blau für Universalkissen 2 Stück
B43834	Textilbezug blau für Hemi-Armkissen S
B43833	Textilbezug blau für Hemi-Armkissen M
B43832	Textilbezug blau für Abduktionskissen S
B43831	Textilbezug blau für Abduktionskissen M
B43830	Textilbezug blau für Zylinderkissen S
B43829	Textilbezug blau für Zylinderkissen M
B43828	Textilbezug blau für Ringkissen S
B43827	Textilbezug blau für Ringkissen M
B43826	Textilbezug blau für Semi-Fowler-Kissen S
B43825	Textilbezug blau für Semi-Fowler-Kissen M
B43824	Textilbezug blau für Seitenlagerungskissen S
B43823	Textilbezug blau für Seitenlagerungskissen M
B43822	Textilbezug blau für Halbmondkissen S
B43821	Textilbezug blau für Halbmondkissen M
B43820	Textilbezug blau für Deltakissen S
B43819	Textilbezug blau für Deltakissen M
B43818	Textilbezug blau für Universalkissen S
B43817	Textilbezug blau für Universalkissen M



- Bezüge sind mit einem Reißverschluss ausgestattet
- Elastisch, strapazierfähig und knitterfrei
- Geräuscharm und sehr geschmeidig
- Wasserdampfdurchlässig
- Pflegeleicht, waschbar bis 60° C
- Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen

Produkt übersicht



Seitenlagerungskissen


HMV-Nummer: 11.11.05.2002

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43800	180 x 31
M	P43801 (Medium)	180 x 31
S	P43799	142 x 26



Details

- körperlanges, s-förmiges Kissen zur kompletten seitlichen Positionierung
- anatomische Vorformung erleichtert die Anwendung
- die körperorientierten Rundungen reduzieren die Faltenbildung des Kissens

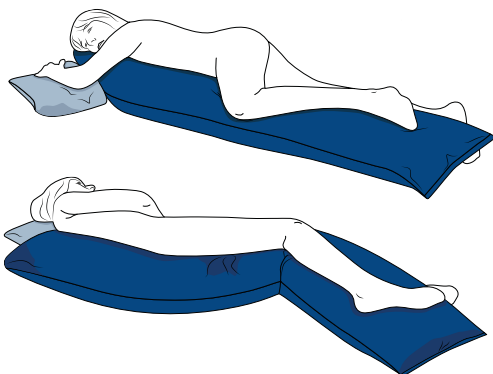

Anleitung zur Positionierung in 30°-Seitenlagerung

- Patient/Bewohner auf gewünschte Seite drehen
- Kissen so aufschütteln, dass sich die Mehrzahl der Polystyrolkugeln auf einer Seite befindet
- pralle Seite im Bereich der Schulter und entsprechend der Körperform anlegen (leere Seite zeigt Richtung Füße)
- Polystyrolkugeln leicht mit beiden Händen individuell vom Kopf- in Richtung Fußende bewegen und anmodellieren, auf Stützung des Beckens, Abduktion der Knie und Freilagerung der Ferse achten
- Patienten/Bewohner zurück auf das Kissen drehen, Liegeposition prüfen und ggf. anpassen (Kopf, Schulter, Becken, Knie und Fuß)

Produkt übersicht



Universalkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0011

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43772	60 x 40
L	P43773	70 x 50
S	P43771	45 x 30



Deltakissen

HMV-Nummer: 11.11.05.1013

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43794	60 x 40
S	P43793	42 x 25



Halbmondkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.1014

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43796	180 x 31
S	P43795	142 x 25



Produkt übersicht



Semi-Fowler-Kissen



HMV-Nummer: 11.11.05.1015

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43798	65 x 50 x 15
S	P43797	50 x 35 x 13



Details


- u-förmiges Kissen mit erhöhtem Mittelteil
- multifunktional zur Lagerung verschiedener Körperbereiche anwendbar

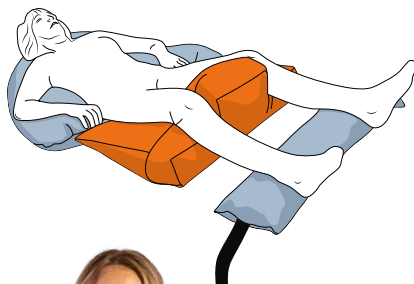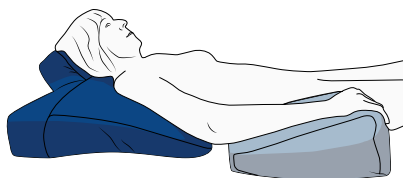

George Ryerson Fowler (1848-1906)

brit. Arzt, erkannte, dass Positionen mit aufgerichtetem Oberkörper im Krankenbett die Atmung erleichtern.

Semi-Fowler-Position: Erhöhung des Oberkörpers um 15-30°

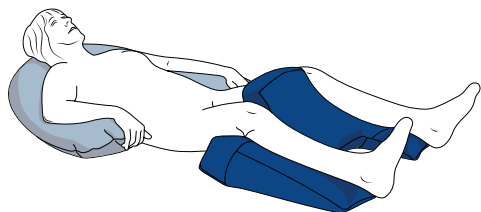

Produkt übersicht



Zylinderkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0014

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43779	70 x 17
	P43780 (2 St.)	31 x 17
S	P43778	45 x 14



Ringkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.1036

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43777	130 x 20
S	P43776	106 x 15



Abduktionskissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0015

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43807	30 x 15 x 21
S	P43806	23 x 12 x 18



Produkt übersicht



Fersenfreilagerung

HMV-Nummer: 11.11.05.0016


Bestellnr.

M	P43784
S	P43783




Details

- schuhförmiges, direkt am Fuß platziertes Kissen mit Hohlfaserfüllung
- Freilagerung der Ferse durch verstärkt unterfütterte Bereiche der Fußsohle und des Achillessehnenansatzes
- Schutz der inneren und äußeren Fußknöchel durch Weichpolsterung
- beidseitig anwendbar
- variabel für mehrere Schuhgrößen einsetzbar dank des Klettverschlusses (orange = bis Größe 37, blau = ab Größe 38)

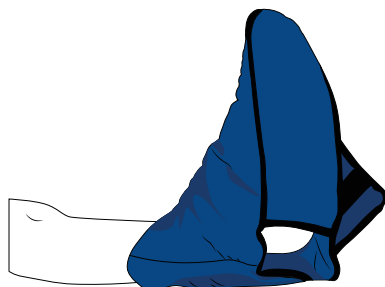

Hinweise

- Wir empfehlen die zusätzliche Verwendung von Socken!
- Das Produkt ist nicht zum Laufen geeignet.

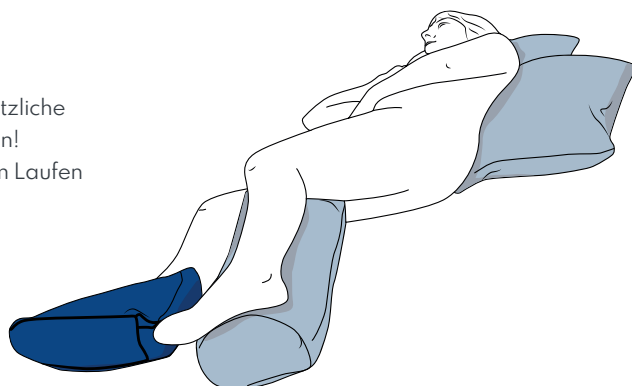

Produkt übersicht



Fersenentlastungsgurt

HMV-Nummer: 11.11.05.0012

	Bestellnr.	Größe in cm
	P43792	90 x 15



Hemi-Armkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0017

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43786	58 x 36 + 48 x 16Ø
S	P43785	45 x 30 + 30 x 13Ø



Produkt übersicht





Rückenlagerungskissen

HMV-Nummer: 11.11.05.2007

	Bestellnr.	Größe in cm
M	P43803	200 x 60
S	P43802	140 x 45

Details

- körperlanges π -förmiges Kissen
- Weichlagerung, Unterfütterung und Positionierung des gesamten Körpers mit nur einem Kissen
- Freilagerung individuell definierter Körperbereiche zur lokalen Druckreduzierung
- Modellierung am Körper bewirkt eine somatische Stimulation, verbessert die Körperwahrnehmung und folgt so dem Konzept der Basalen Stimulation

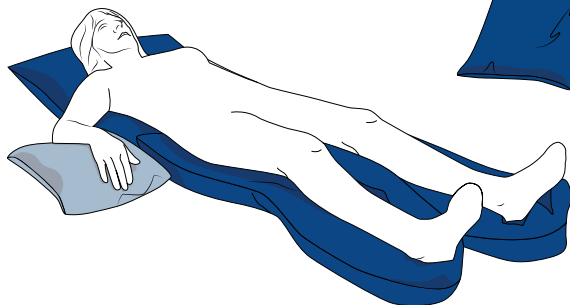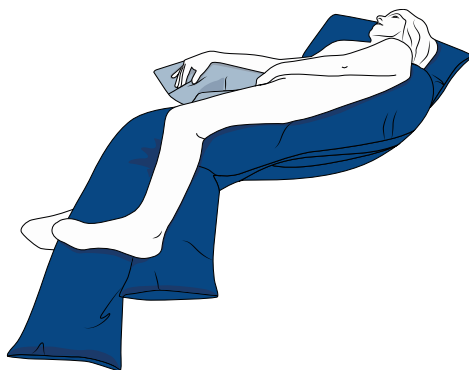

Produkt übersicht

Mikrolagerung



Bestellnr.	Größe in cm
P43811 (3 St.)	30 x 17
P43810	30 x 17



Universallagerungsset

3-teilig von CAREPUR

	Bestellnr.	Beschreibung	HMV-Nummer
	P43812	Universallagerungsset bestehend aus:	
M	P43772	Universalkissen M	11.11.05.0011
S	P43771	Universalkissen S	11.11.05.0011
M	P43800	Seitenlagerungskissen M	11.11.05.2002



Produkt übersicht



CAREPUR Beinpositionierung Basis + Modul

HMV-Nummer: 11.11.05.0038

Bestellnr.	Beschreibung	Größe in cm
P43787	CAREPUR Beinpositionierungsset	
P44455	Basiskeil	58 x 55 x 12
P44456	Unterschenkelmodul	50 x 21 x 10,5



Produkt übersicht



CAREPUR Beinpositionierung Kompakt

	Bestellnr.	Beschreibung	Größe in cm
M	P44457	Beinpositionierung Kompakt M	58 x 55 x 12
S	P43789	Beinpositionierung Kompakt S	58 x 40 x 10



Produkt übersicht



CAREPUR Positionierungsset I

HMV-Nummer: siehe Tabelle

	Bestellnr.	Beschreibung	HMV-Nummer
	P43809	CAREPUR Positionierungsset I – 7-teilig, bestehend aus:	
M	P43772	Universalkissen M	11.11.05.0011
M	P43784	Fersenfreilagerung M	11.11.05.0016
M	P43796	Halbmondkissen M	11.11.05.1014
S	P43776	Ringkissen S	11.11.05.1036
S	P43778	Zylinderkissen S	11.11.05.0014
M	P43800	Seitenlagerungskissen M	11.11.05.2002
	P43814	Transporttasche blau	-



Produkt übersicht



CAREPUR Positionierungsset II

HMV-Nummer: siehe Tabelle

	Bestellnr.	Beschreibung	HMV-Nummer
	P43808	CAREPUR Positionierungsset II – 7-teilig, bestehend aus:	
S	P43771	Universalkissen S	11.11.05.0011
M	P43798	Semi-Fowler-Kissen M	11.11.05.1015
M	P43786	Hemi-Armkissen M	11.11.05.0017
M	P43794	Deltakissen M	11.11.05.1013
M	P43792	Fersenentlastungsgurt	11.11.05.0012
M	P43800	Seitenlagerungskissen M	11.11.05.2002
	P43813	Transporttasche orange	-



Weitere Produkte



In unserem Sortiment finden Sie viele weitere Produkte zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. Hier einige Beispiele aus den Bereichen Liegen und Sitzen.

DEKULAST BASIC

HMV-Nummer: 11.29.05.0052

Antidekubitusmatratze mit guten Komforteigenschaften bei hoher Gewichtsbelastung, bestehend aus 7-Zonen-HR Schaumstoffkern und PU-Weichlagerungsliegefläche. Die Randzone mit Duplexschnitt erleichtert die Mobilisierung und dient der Sturzprophylaxe.



DEKUCARE VISCO

HMV-Nummer: 11.29.05.0041


Matratze mit hohem Liegekomfort durch Kombination von PU-Schaumstoffkern mit Längs- und Quereinschnitten und viscoelastischer Liegefläche, die eine hohe Punktelastizität zur genauen Anpassung an die Körperkonturen aufweist und die Durchblutung des gesamten Körpers verbessert.



CARFLEX

HMV-Nummer: 11.29.05.1004

Punktelastische Matratze mit weicher atmungsaktiver Würfelstruktur der Liegefläche. Diese passt sich gut an die Körperkonturen des Patienten an und schafft ein angenehmes Liegegefühl.

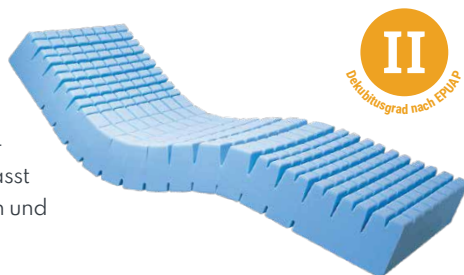

Weitere Produkte

VISCOLUX

HMV-Nummer: 11.39.01.1025

Das viscoelastische Sitzkissen aus Schaumstoff mit Formgedächtnis und anatomisch vorgeformter Sitzfläche ermöglicht die exakte Anpassung an die Körperkonturen des Patienten/Bewohners und gewährleistet einen hohen Sitzkomfort bei guter Druckentlastung.



CUBE GEL

HMV-Nummer: 11.39.02.1007

Das Kissen mit würfelförmiger, strukturierter Sitzfläche zur Dekubitusprophylaxe & -therapieunterstützung besteht aus elastischem Polyetherschaumstoff und hat eine Freilagerungskontur welche mit einer Weichgel-Einlage im Bereich der Sitzbeinhöcker unterfüttert ist. Die unterschiedlich hohen Schaumstrukturen ermöglichen eine komfortable Sitzposition, eine Führung der Oberschenkel und die konturgenaue Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten.



CUBE FLEXI

HMV-Nummer: 11.39.01.3014

Das Sitzkissen besteht aus elastischem Polyetherschaumstoffrahmen mit reversiblen und einzeln austauschbaren bzw. herausnehmbaren, würfelförmigen Elementen in zwei Höhen, aus drei verschiedenen Schaumqualitäten.



Fremdwortverzeichnis

30° -Lagerung:	halbseitige Anhebung einer Körperhälfte in Rückenlage
135° -Lagerung:	halbseitige Anhebung einer Körperhälfte in Bauchlage
Abduktion:	Bewegung von der Körpermitte weg, Spreizen
Basale Stimulation:	Konzept zur Anregung und Förderung der Wahrnehmung des eigenen Körpers
Dekubitus:	Wundliegegeschwür
Hemiparese:	(unvollständige) halbseitige Lähmung
Inkontinenz:	ungewolltes Ausscheiden von Körperflüssigkeiten
Kontraktur:	Bewegungseinschränkung durch Verkürzung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien
Nervus ulnaris:	Ellbogennerv („Musikantenknochen“)
paretisch/Parese:	(unvollständig/e) gelähmt/Lähmung
physiologisch(e Positionierung):	normale, natürliche Körperhaltung
Prophylaxe/prophylaktisch:	Vorsorge/vorsorglich
Sakralbereich:	Körperbereich um das Kreuzbein (unterster Teil der Wirbelsäule)
somatisch:	körperlich, den Körper betreffend
Thorax/thorakal:	Brustkorb/den Brustkorb betreffend
triangulär:	dreieckig
venös:	die Venen betreffend
vestibulär:	den Gleichgewichtssinn betreffend

Reinigungshinweise, Material, Impressum



Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)

Füllung: 100 % Polystyrolkugeln

Eigenschaften: flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv (wasser- dampfdurchlässig), abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

Reinigung/ Desinfektion: Kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Pflege: Bitte chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel benutzen.


Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten!

Herzlich willkommen im SHP-Shop

Nutzen Sie die komfortable Bestellmöglichkeit für unser umfangreiches Produktfolio zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung sowie Zubehör.

Dieser B2B-Shop richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.

www.s-h-p.eu

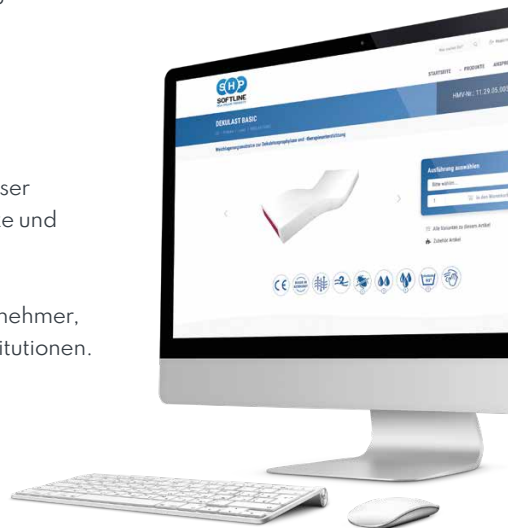

Impressum

Positionierungsratgeber

Informationen für Pflegekräfte und
pflegende Angehörige (Version: 07/2025)

Herausgeber:

SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Lebbiner Weg 1

15859 Storkow (Mark)

Germany

Telefon: +49 33678 - 40 77 00

Telefax: +49 33678 - 40 77 29

E-Mail: info@s-h-p.eu

Web: www.s-h-p.eu

USt-IdNr.: DE202767024

