

Auxilia


Bauchgurt - Steckverschluss

AUXILIA : eine breite Auswahl von Produkten, die auf verschiedene Arten der Unterstützung zugeschnitten sind. Ein Sortiment, das eine gute Stabilität gewährleistet und die Sicherheit und den Komfort von Rollstuhlfahrern oder ruhenden Benutzern verbessert.



Bauchgurt - Steckverschluss

	Größe	Abmessungen (in cm)*			
		a	b	c	d**
D07.70450	1	18	110	90	395
D07.70460	2	20	120	90	405
D07.70470	3	22	130	90	415

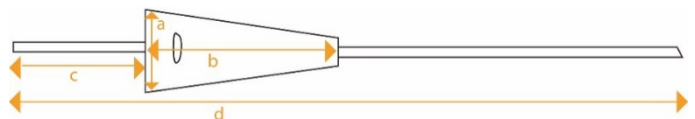

* Abmessungen als Anhaltspunkt angegeben **Gurt maximal gelockert

Tipps zur Installation

1. Lösen Sie die Schnallen.
2. Legen Sie den Gurt um den Patienten und überkreuzen Sie ihn am Bauch.
3. Befestigen Sie die Schnallen an der Stuhllehne.
4. Passen Sie die Bänder entsprechend der Morphologie des Patienten an.

Anwendungseinschränkungen: Nicht geeignet für sehr unruhige Patienten.

Zusammensetzung :

- Polyestergewebe mit Baumwollrückseite
 - Gewebe : 100% Polyester
 - Rückseite : 100% Polyester
 - Stoff : 100% Baumwolle
- Nähte : 100% Baumwolle
- Band : 100% Polypropylen
- Schnallen : 100% Acetal Kunststoff

Waschanleitung:

Schließen Sie die Gurte vor dem waschen in der Maschine. Überprüfen Sie vor jedem waschen folgende Bestandteile: Stoff, Band, Nähte, Schnallen. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte.

Garantie : Dieses Produkt hat ab Kaufdatum eine Garantie von 2 Jahren auf jeden Herstellungsfehler. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit dieser Betriebs- und Wartungsanleitung verwendet und gehandhabt wird.