




Installation des Turn All®-Systems auf dem Bett

1


Nehmen Sie die Matratze vom Bett (Abbildung 1)

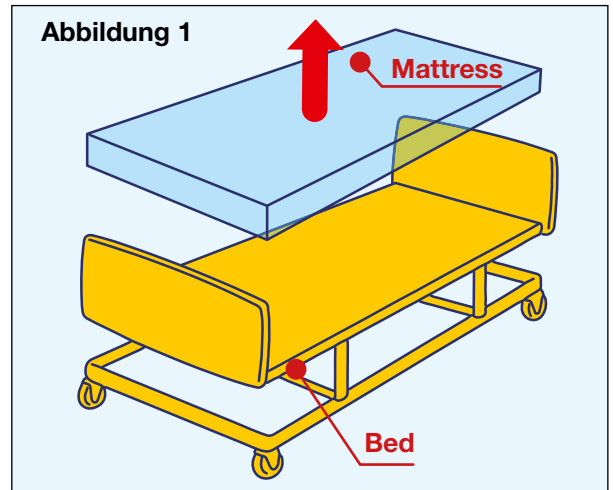

2

Legen Sie das Turn All®-System (A) auf den Bettkasten, wobei das System so ausgerichtet wird, dass sich der Schlauchanschluss (B) am Fußende des Bettes befindet (Abbildung 1.2).


Das Turn All® -System wird mit den Riemen (H) am Deckel am Bettrost befestigt (Abbildung 1.2).

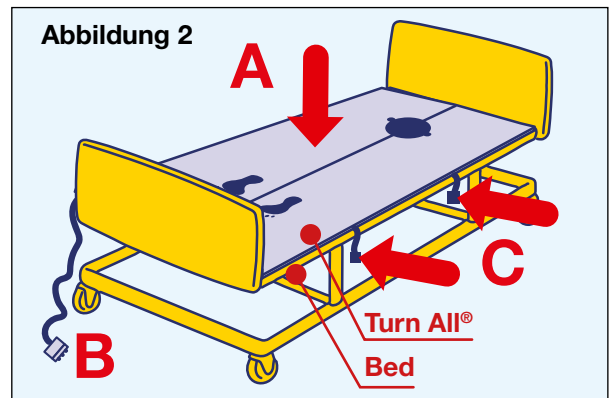

3


Legen Sie die Matratze wieder auf das Bett über dem Turn All®-System (Abbildung 1.3).

Die Turn All®-Pumpe (C) wird mit Hilfe der beiden Klammern auf der Rückseite der Pumpe am Bettende angebracht (Abbildung 1.3).

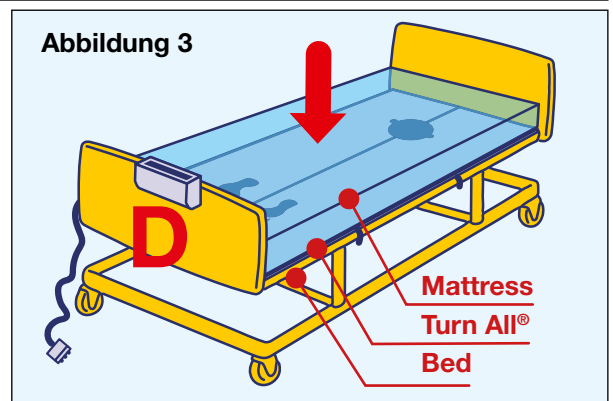

4

Stecken Sie den Schlauchanschluss (B) in die Pumpe (D) (Abbildung 4).

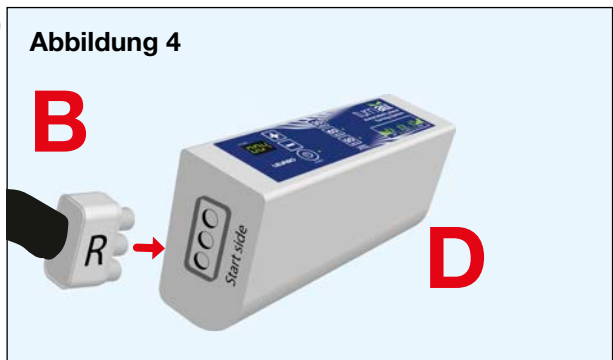




Starten und Einstellen des Turn All®-Systems

1

Schließen Sie das Netzkabel an die Pumpe an (Abbildung 7)
Schließen Sie das Netzkabel an das Stromnetz an.

Abbildung 1

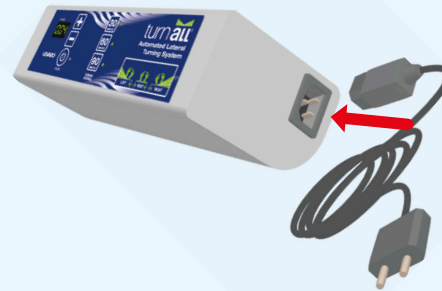


2

Schalten Sie die Pumpe mit der "POWER"-Taste (D) ein (Abbildung 4).

Stellen Sie den Timer "G" mit den Tasten "+" und "-" ein.

Die Zahl im Timer "G" gibt an, wie viele Stunden das System automatisch laufen soll.

Abbildung 2

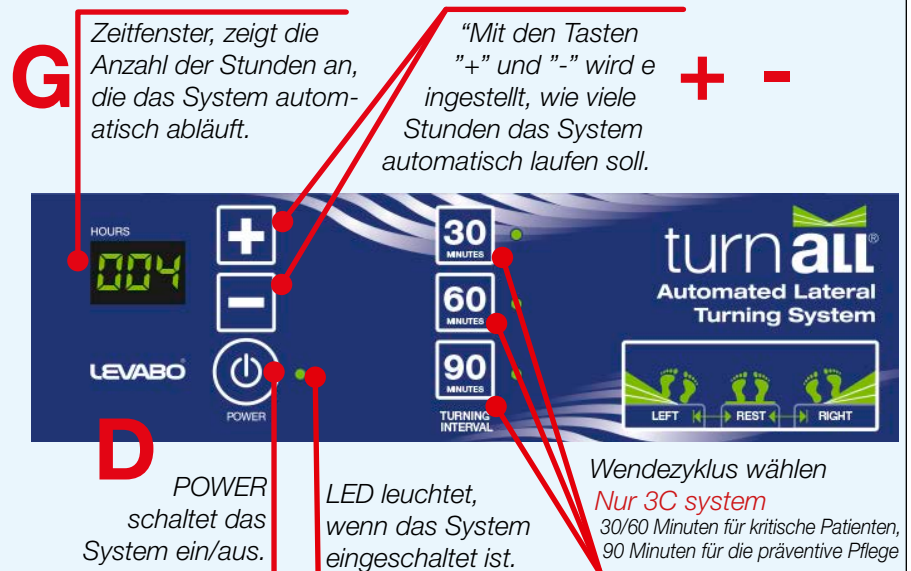

3

Das Turn All® -System läuft nun automatisch. Eine Seite der Matratze wird nun für 30/60/90 Minuten angehoben (1C system 90 Minuten), dann 5 Minuten flach liegend während des Übergangs, dann wird die andere Seite für 30/60/90 Minuten angehoben (1C system 90 Minuten), dann 5 Minuten flach liegend während des Übergangs.

Diese Sequenz wird für die in der Zeitschaltuhr "G" eingestellte Stundenzahl wiederholt und endet in der flachen Rückenlage.

WICHTIG. Wenn das System nach dem automatischen Betrieb nicht benutzt wird, wird es mit der POWER-Taste (D) und dann über die Netzsteckdose ausgeschaltet. Lösen Sie den Schlauchanschluss (B) von der Pumpe (C). Den Deckel (E) NICHT auf dem Schlauchanschluss (B) installieren.

Abbildung 3


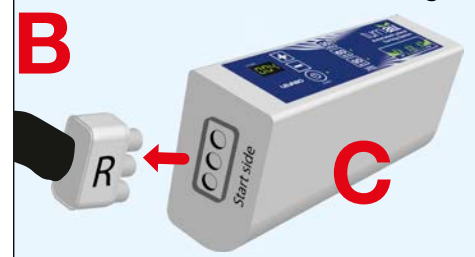


Abbildung 4




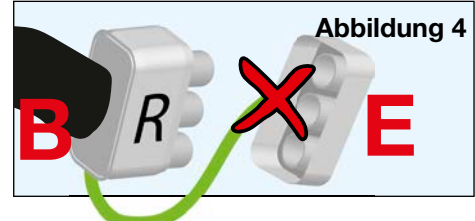


Verwendung des Turn All® Systems zum statischen Heben

1

Wenn das Turn All®-System statisch verwendet werden soll, wird der Schlauchanschluss entsprechend der anzuhebenden Seite umgekehrt.

Der Schlauchanschluss (B) ist auf der rechten Seite mit den Buchstaben "R" gekennzeichnet und "L" für die Linke.

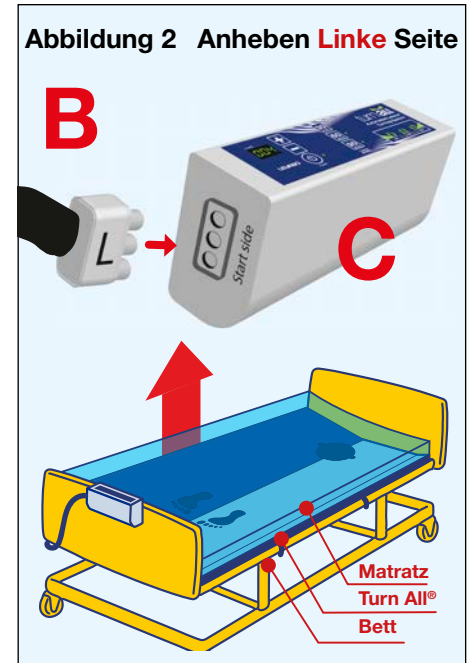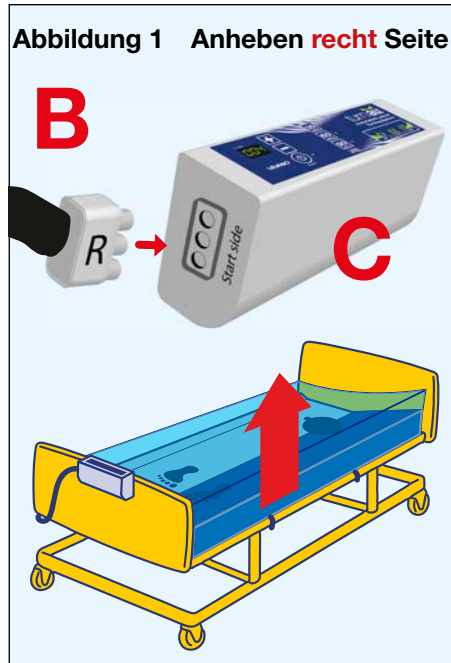


Wenn das Anheben auf der rechten Seite des Bettes, vom Fußende aus gesehen, beginnen muss, wird der Schlauchanschluss mit dem Buchstaben "R" in Richtung des Textes "Start side" an der Pumpe gedreht, wie in (Abbildung 2) gezeigt.

Wenn das Anheben auf der linken Seite des Bettes, vom Fußende aus gesehen, beginnen muss, wird der Schlauchanschluss mit dem Buchstaben "L" wie in (Abbildung 3) gezeigt zum Text "Start side" auf der Pumpe gedreht.

2

Die Pumpe wird gestartet und gepumpt, bis die gewünschte Hubhöhe erreicht ist.

Dann wird die Schlauchverbindung (B) von der Pumpe (C) getrennt (Abbildung 4).

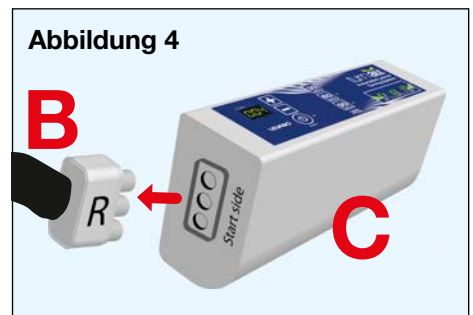


3

Die Schlauchverbindung (B) wird nun mit dem Deckel (E) verschlossen (Abbildung 6). Wenn der Deckel (E) auf dem Schlauchanschluss (B) montiert ist, wird die Pumpe (C) durch die "POWER"-Taste (D) abgeschaltet.

Das Turn All® -System verbleibt nun in dieser Position, bis der Deckel (E) wieder entfernt und damit die Luft aus dem System entfernt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Luftkammern vollständig entleert sind, bevor Sie den Schlauchanschluss (B) wieder an die Pumpe (C) anschließen.

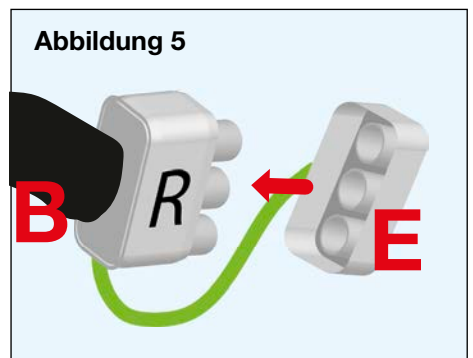

Reinigung und Desinfektion

Turn All® Cover (das blaue Cover)

Turn All® Cover (die blaue Außenhülle). Die innere Hebematratze muss von der Turn All®-Hülle, vor dem Waschen der Hülle, entfernt werden.

Das Turn All® Cover kann in einer Waschmaschine v. 90° C. und Wäschetrockner auf niedriger Einstellung gewaschen werden.



Turn All® Cover kann gereinigt werden in Autoklav. max. 121° C.

Die Turn All® Multi Patient Innenmatratze kann mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Die Desinfektion kann mit einer geeigneten Lösung auf Chlorbasis von 1% durchgeführt werden.


Reinigung und Desinfektion



Für mehr Informationen
Lesen Sie die
Bedienungsanleitung


1

Wenn das Turn All®-System gereinigt werden muss, können Sie die Innenmatratze herausnehmen (H) Abbildung 1 benötigt wird, öffnen Sie den Reißverschluss in der Abdeckung (J) Abbildung 1 und entfernen Sie den oberen Teil.

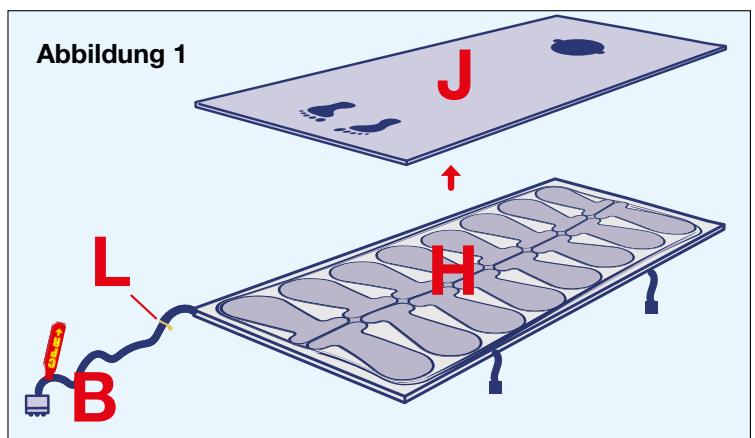


2

Öffne den Reißverschluss (L) Abbildung 1 und Ziehen Sie die Verbindungsschläuchen (B) Abbildung 1-2) durch die Öffnung im unteren Teil der Hülle.

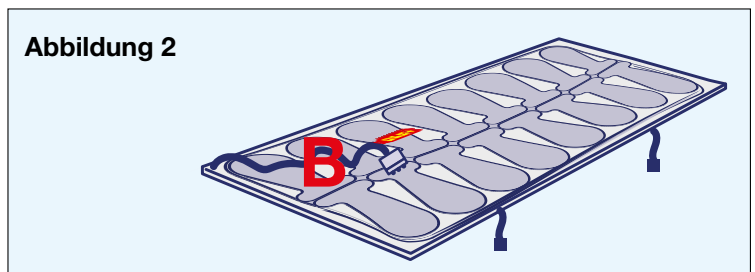

3

Lösen Sie die 6 Knöpfe (K) Figur 3.

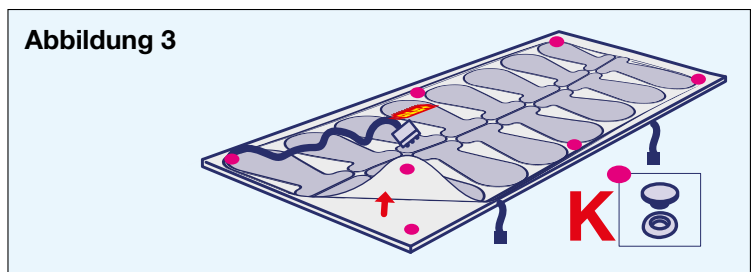

4

Die innere Matratze (H) Abbildung 4, kann jetzt entfernt werden. Die gereinigte Matratze wird in umgekehrter Reihenfolge in den Bezug integriert.

