

G8WAY

B, 2019-12




150 kg



max. 6°



(A)

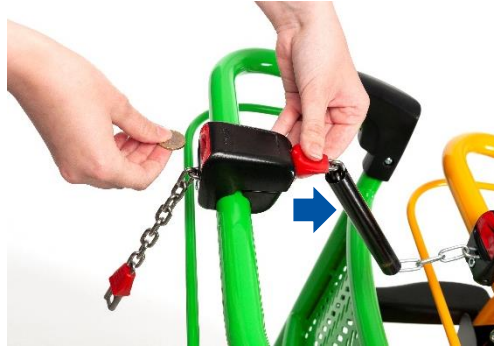

B




C



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout, BE
www.vermeiren.com

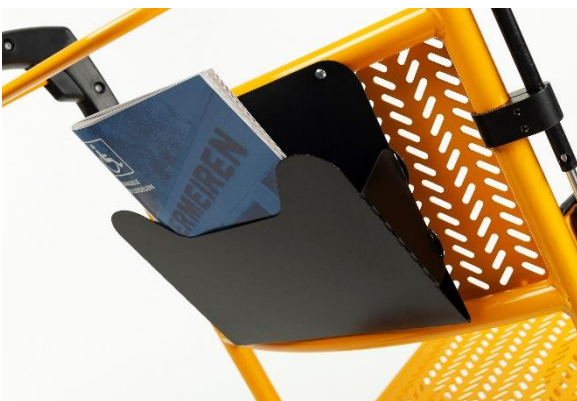

1. Wartungshinweise


**VORSICHT**

Gefahr von Personen- oder Sachschäden

Reparaturen und Erneuerungen dürfen nur von geschultem Personal und mit Original-Ersatzteilen von Vermeiren durchgeführt werden.

Bremsen einstellen

1. Entfernen Sie die Plastikkappe (1) an der Seite der Schiebepstange, indem Sie die 4 Schrauben (2) an beiden Seiten der Kappe entfernen.
2. Lösen Sie den Kabelbinder (3).
3. Ändern Sie die Kabelspannung wie gewünscht.
4. Ziehen Sie den Kabelbinder (3) wieder fest.
5. Setzen Sie die Plastikkappe (1) wieder auf und ziehen Sie die Schrauben (2) fest an.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Seite der Schiebepstange.

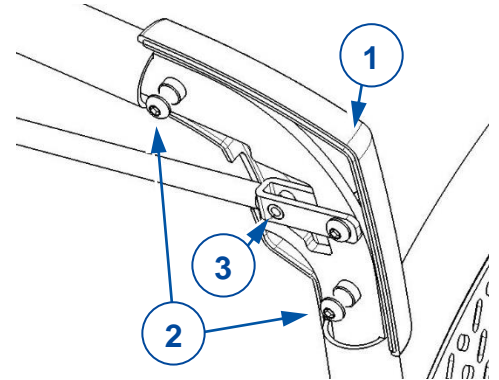

2. Hinweise zum Gebrauch des Produktes

Wartungstermine

Vor jeder Benutzung, kontrollieren Sie folgende Punkte:

- Alle Teile: vorhanden und nicht beschädigt oder verschlissen.
- Alle Teile: sauber.
- Zustand der Räder: nicht beschädigt oder verschlissen.
- Zustand der Rahmenteile: keine Deformation, Instabilität, Schwachstelle oder lose Verbindungen.

Wenden Sie sich wegen etwaiger Reparaturen oder Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Jährlich oder häufiger:

Lassen Sie Ihren Rollstuhl mindestens einmal pro Jahr oder häufiger von Ihrem Fachhändler inspizieren und warten. Die minimale Wartungshäufigkeit ist von der Benutzung abhängig und sollte daher zusammen mit Ihrem Fachhändler abgesprochen werden.

Räder

Achten Sie darauf, dass keine Drähte, Haare, Sand oder Teppichfasern an den Rädern anhaften.

Reinigung

Wischen Sie alle festen Teile des Rollstuhls mit einem feuchten (nicht durchnässten) Tuch ab. Benutzen Sie ggf. eine milde Seife, die für Lacke und Kunststoffe geeignet ist.

Desinfektion

VORSICHT

Beschädigungsgefahr

Eine Desinfektion darf nur von dafür geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Fachhändler.